



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: fax 199 400 403 – gima@gimaitaly.com
Export: – fax + 39 02 95380056 – export@gimaitaly.com
– www.gimaitaly.com

REF 29513-29514

Coprisonda in lattice
Latex probe cover
Couvre-sonde en latex
Cubresonda de látex

ITALIANO

ISTRUZIONI D'USO

- Evitare di toccare il coprisonda con unghie, “anelli, oggetti affilati, etc.”, Prestare attenzione quando si estrae il coprisonda dalla confezione.
- Porre il gel lubrificante all'interno del coprisonda.
- Svolgere il coprisonda con delicatezza sul trasduttore.
- Il coprisonda può essere utilizzato soltanto una volta, in quanto il riutilizzo potrebbe provocarne la rottura o il danneggiamento. Non lavarlo mai.
- Per lubrificarlo usare soltanto un gel lubrificante a base d'acqua. I lubrificanti oleosi possono danneggiare il coprisonda.
- Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
- Osservare la data di scadenza stampata sulla confezione.

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE

- Mantenere i coprisonda in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce solare e dal calore.
- Non rimuovere dalla confezione fino al momento dell'uso.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

- Dopo l'uso, gettare il coprisonda nel contenitore dei rifiuti sanitari.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

- Avoid touching the latex cover with sharp nails, rings, etc. Handle carefully when you remove it from its package.
- Place the coupling gel for ultrasound scanner inside the latex cover.
- Unroll the latex cover carefully over the ultrasound scanner or probe.
- The latex cover can be used just once. Never wash it.
- To lubricate it, use only water-based coupling gels. The oily lubricants can damage the latex cover.
- This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.
- Check the expiry date printed on the package.

INSTRUCTIONS FOR STORAGE

- Keep the latex covers in a cool dry place away from sunlight and heat.
- Do not take them out of its package until the moment of use.

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

- After use, throw out the latex cover in a container for refuses of medical devices.