

CARTA PER REGISTRAZIONI MEDICALI
ISTRUZIONI per L'USO

DESTINAZIONE D'USO: Le carte per registrazione per apparecchiature elettromedicali sono state studiate per la registrazione di tracce relative all'andamento nel tempo di parametri fisiologici, rilevati dagli strumenti diagnostici su cui le carte sono installate, al fine di poter rilevare anomalie di tipo morfologico o alterazioni del parametro osservato.

Si prevede l'uso delle carte diagrammate da parte di personale esperto ed addestrato all'uso di questa tipologia di prodotto.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

I dati identificativi del prodotto (codice, lotto, data di produzione e dispositivo diagnostico su cui la carta deve essere installata) sono riportati nell'etichetta identificativa apposta sulla confezione del prodotto.

USO ED INSTALLAZIONE:

- ✓ Verificare prima dell'uso che il modello di carta ed il diagramma (se presente) su di essa stampato sia coerente con l'uso previsto.
- ✓ Aprire la confezione senza utilizzare strumenti taglienti che possono danneggiare la carta stessa, verificare l'integrità del prodotto.
- ✓ Per l'impiego di questo prodotto consultare sempre il manuale d'uso dell'apparecchio al quale è destinato, al fine di individuare la corretta procedura di installazione della carta.
- ✓ Accertarsi che il dispositivo (pacco o rotolo) sia comodamente alloggiato nell'apposito vano portacarta dell'apparecchio in modo da non causare impedimenti di alcun genere in fase di trascinamento. Non forzare mai l'introduzione della carta.
- ✓ Se non diversamente specificato sul diagramma, l'eventuale reticolo stampato ha unità di misura in millimetri e grado di precisione di $\pm 1\%$.

CONSERVAZIONE:

- ✓ **Prima dell'utilizzo**
Si consiglia di conservare la carta in luogo fresco e asciutto. Esposizioni prolungate del prodotto a temperature elevate o in presenza di condensa causata da eccesso di umidità possono portare al decadimento delle prestazioni. Evitare sempre l'irraggiamento solare diretto, il contatto con liquidi e l'esposizione a sorgenti di luce fluorescente (UV).
- ✓ **Dopo la registrazione si consiglia di:**
Conservare la carta in luoghi freschi e asciutti. Evitare sempre l'irraggiamento solare e l'esposizione a sorgenti di luce fluorescente (UV). Evitare il contatto con liquidi o prodotti contenenti sostanze adesive, grassi, acide, oppure solventi quali alcoli, chetoni, eteri e simili. Evitare il contatto con altre carte termiche o autocopianti o carte carbone. Non inserire la carta in buste di PVC e utilizzare contenitori idonei, per le carte termiche, tipo cartelline in carta tipo manila e/o poliestere e poliammide.

SMALTIMENTO E SICUREZZA:

L'uso, l'immagazzinamento e lo smaltimento di questa carta non provoca inquinamento ambientale. Le carte termiche possono essere smaltite negli appositi raccoglitori per il riciclaggio della carta. L'infiammabilità di questo prodotto è simile a quella delle carte comuni. Per spegnere focolai di incendio di questo prodotto usare acqua o i normali estintori.

CONTROINDICAZIONI:

In base alle esperienze esistenti e ai risultati di diverse analisi non è da prevedere nessun effetto nocivo in conseguenza di un uso appropriato del prodotto.

SEGNALAZIONI:

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui ha sede.