


MANUALE UTENTE

Video colposcopio digitale
modello: COLpro777-Full
HD



Divine Meditech Pvt Ltd
G-197, Sector-63, Gautam Buddha Nagar
Uttar Pradesh, India-201301

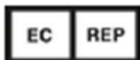

Meddevices Lifesciences
B.V.Keizersgracht 482,
1017 EG Amsterdam, the Netherlands

Importato da:
GIMA S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Indice

CAP. 1	PREFAZIONE	2
CAP. 2	DESCRIZIONE DEL COLpro777Full HD	2
CAP. 3	AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI GENERALI	2
CAP. 4	INDICAZIONI PER L'USO	4
CAP. 5	SPECIFICHE TECNICHE	10
CAP. 6	ELENCO DEI PEZZI DI RICAMBIO	11
CAP. 7	MANUTENZIONE DEL SISTEMA	12
CAP. 8	TERMINI DI GARANZIA E CONDIZIONI (ACQUISTO IN TUTTO IL MONDO)	13
CAP. 9	FORMATO ETICHETTATURA	14
CAP. 10	LISTA DI CONTROLLO ACCESSORI	15

Cap. 1 **PREFAZIONE**

Questo manuale contiene informazioni che non possono essere copiate o duplicate, integralmente o in parte, senza esplicita approvazione di Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA). Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al manuale utente, che possono influire sulle istruzioni contenute in questo manuale, senza preavviso. L'utilizzatore di questo apparecchio sarà l'unico responsabile per qualsiasi tipo di danno, malfunzionamento dell'unità o lesioni all'utilizzatore derivanti dall'uso improprio o da eventuali riparazioni o modifiche eseguite da altre persone diverse da noi o da un tecnico debitamente autorizzato dal produttore ad eseguirle.

Il presente manuale utente fornisce istruzioni per l'utilizzo del video colposcopio digitale COLpro777-FullHD. Leggere tutte le istruzioni, le precauzioni e le avvertenze prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni o lettura delle avvertenze potrebbe provocare lesioni per la paziente o l'operatore. La versione COLpro777-FullHD è l'ultimo modello, il più avanzato e recentemente aggiornato della serie COLpro777-FullHD. Sono state aggiunte molte funzioni grazie ai riscontri ricevuti dai vari utilizzatori e persone interessate all'ampiamente conosciuta serie COLpro777-FullHD. Il prodotto consegnato può variare leggermente per colore o forma o specifiche, in virtù del suo continuo sviluppo.

Cap. 2 **DESCRIZIONE DEL COLpro 777- Full HD**

Il COLpro777-FullHD è un ausilio per la colposcopia. La colposcopia è una procedura ginecologica che consente al medico di osservare la cervice, utilizzando il colposcopio. Questo strumento è costituito dalla testina della telecamera montata su un supporto verticale. Questo strumento ingrandisce la cervice, la vagina e l'area dei genitali quando il medico punta la testina della telecamera sulla vagina, dove è stato posizionato lo speculum.

Lo strumento utilizza la più recente tecnologia digitale per fornire immagini ad alta risoluzione della reale colposcopia. Si tratta di un video colposcopio di ultima generazione che tramite immagini CCD e tecnologia per l'illuminazione, design aerodinamico e dimensioni compatte, offre caratteristiche straordinarie, come la possibilità di scegliere tra messa a fuoco manuale o automatica, filtro verde elettronico graduato, indicatore d'ingrandimento, per citarne solo alcune. Le altre innovazioni apportate a questo strumento sono l'immagine E-flip e speculare, la facilità di cambiare l'intensità della luce, la facilità di scegliere diversi contrasti di colore per rendere la colposcopia più efficace.

Il COLpro777-FullHD è concepito per rilevare la presenza di tessuto pre-cancerogeno o cancerogeno o altre anomalie nell'area della cervice. Fino ad oggi, la colposcopia ha giocato un ruolo importante nella valutazione e nel trattamento delle infezioni cervicali come il cancro della cervice, le erosioni e le infiammazioni. Questo manuale è stato preparato per fornire al personale autorizzato informazioni sul montaggio, le funzioni e le prestazioni abituali relative alla visualizzazione del COLpro777-FullHD. Viene fornito insieme al dispositivo e dovrebbe sempre rimanere vicino ad esso. L'utilizzatore deve leggere e comprendere il contenuto di questo manuale prima di utilizzare il video colposcopio. Il funzionamento deve avvenire in conformità con le norme di sicurezza previste, allo scopo di garantire la sicurezza della paziente e dell'operatore.




Cap. 3 **AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI GENERALI**

Utilizzo previsto: *per esaminare i tessuti della vagina, della cervice e dei genitali esterni tramite ingrandimenti, al fine di verificare citologia cervicale anomala o lesioni sospette del tratto genitale femminile inferiore. Utilizzato anche per la relativa biopsia e il trattamento, ove indicato.*

Requisiti ambientali:

- ingombro del supporto a pavimento e della telecamera: 0, 4m²
- temperatura ambiente: 5 °C - 40 °C
- umidità: ≤ 80%
- pressione atmosferica: 70 kPa - 106 kPa
- AC 100~240 V, 50/60 Hz
- messa a terra appropriata

Simboli e terminologia:

	Attenzione: consultare il manuale d'uso per ulteriori informazioni
	Cautela: queste indicazioni si riferiscono a una condizione o pratica, che se non vengono corrette o interrotte immediatamente, possono provocare guasti o danni all'apparecchio.
	Avvertenza: queste indicazioni si riferiscono a una condizione o operazione, che se non vengono corrette o interrotte immediatamente, possono provocare lesioni/malattie alla paziente.



AVVERTENZE

Il colposcopio deve essere collegato ad un'appropriata presa di corrente con la relativa messa a terra di sicurezza. La stanza, in cui viene utilizzato deve essere arieggiata, non presentare pericoli di urto ed essere priva di rumore o altre fonti di interferenza e non essere esposta alla luce diretta del sole.

- Gli utilizzatori di questo apparecchio devono essere adeguatamente addestrati secondo le corrette procedure mediche. Devono avere il tempo di leggere e comprendere queste istruzioni prima di eseguire qualsiasi procedura. Possono anche leggere e seguire le istruzioni di eventuali altri apparecchi usati in correlazione con il colposcopio.
- Il colposcopio non dovrebbe essere usato in presenza di gas o agenti chimici infiammabili o esplosivi, oppure installato in aree, dove normalmente vengono utilizzati tali prodotti.
- Tenere l'apparecchio elettrico lontano da liquidi per evitare scosse e danni allo strumento.
- L'utilizzatore del colposcopio deve attenersi alle condizioni di funzionamento previste dal presente manuale. Altrimenti si potrebbe incorrere in danni alla strumentazione o mettere in pericolo la sicurezza del paziente.
- Tutti gli ingressi e le uscite del segnale sono destinati esclusivamente a collegare le periferiche, che sono conformi alla norma IEC 60601-1 oppure alle altre norme IEC, a seconda della natura del dispositivo periferico. Collegando ulteriori periferiche al video colposcopio si potrebbe aumentare il rischio associato a correnti di dispersione verso il telaio o la paziente. Per garantire la sicurezza dell'operatore e del paziente, l'utilizzatore deve tenere in considerazione i requisiti della norma IEC 60601-1 riguardo alla corrente di dispersione del sistema.
- Non fissare mai l'illuminatore perché è estremamente luminoso e *potrebbe provocare lesioni agli occhi*.



CAUTELE

- Di tanto in tanto controllare che il cavo di alimentazione non presenti abrasioni, tagli o ammaccature.
- Il colposcopio non dovrebbe mai essere conservato o utilizzato in aree dove potrebbe bagnarsi o essere esposto a condizioni ambientali, come temperatura o umidità estrema, luce diretta del sole, polvere, ecc.
- Questo dispositivo o i suoi accessori non comprendono parti soggette a manutenzione da parte dell'utilizzatore. Qualsiasi tentativo di smontare e riparare il dispositivo annullerà la garanzia.
- Non pulire l'illuminatore o le lenti con alcol. Non toccare le parti ottiche o le lenti.
- Non sterilizzare
- Non immergere nessuna parte del dispositivo in soluzioni detergenti.



PRECAUZIONI

- **Sicurezza del colposcopio:** i requisiti di sicurezza menzionati in questo capitolo s'intendono per il colposcopio nel suo complesso e si applicano allo strumento. La loro importanza non è correlata all'ordine di presentazione. **NOTA:** Questo non è un dispositivo per trattamenti.
- Prima dell'uso, accertarsi che il colposcopio è in normali condizioni di funzionamento.
- Se non si allenta la manopola, forzando eccessivamente si può danneggiare l'adattatore coassiale.
- Questo dispositivo effettua esami senza contatto, evitando quindi il contatto con la paziente durante l'uso.
- Non inserire né disinserire mai il cavo del video prima di staccare la corrente dell'intero sistema.
- Senza l'approvazione scritta del produttore, l'utilizzatore non deve rimuovere, modificare o usare accessori non conformi ai requisiti del produttore.
- Maneggiare con cura i cavi di segnale durante il loro collegamento. Allineare i connettori, non inserire o disinserire con forza, altrimenti il cavo e i connettori si potrebbero danneggiare, con conseguente effetto sulla qualità dell'immagine o sull'alimentazione elettrica della telecamera o di altri apparecchi.
- Quando non viene utilizzato il colposcopio l'interruttore di alimentazione dovrebbe essere spento e la telecamera coperta per evitare che s'impolveri.

- Per evitare interruzioni di corrente accidentali e altri potenziali incidenti, usare un gruppo di continuità per il colposcopio.
- Prima di pulire il sistema, assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione del sistema.
- Pulire secondo quanto specificato da Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA).
- Tenere i telefoni cellulari lontani dal dispositivo.
- I materiali di imballaggio dovrebbero essere tenuti lontani dalla portata dei bambini o trattati secondo i regolamenti pertinenti.
- In caso di dubbio, consultare quanto prima la Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA).
- Attenersi a quanto stabilito nel manuale. Questo manuale non sostituisce gli standard medicali.

Cap. 4 INDICAZIONI PER L'USO


Il COLpro777-FullHD è un sistema facile da installare. Prima di installare il sistema, assicurarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti elettrici, elettronici e ambientali.

Installazione: componenti e assemblaggio

componenti supporto verticale: il supporto verticale con l'unità interfaccia può essere collegato al monitor esterno per formare un sistema diagnostico completo. Può inoltre essere collegato a una postazione computerizzata per salvare, analizzare e stampare le informazioni sul paziente, ecc. La sua altezza può essere regolata a seconda delle necessità.

Cavo esterno dell'unità interfaccia

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione; inserire un'estremità nel punto 1 della figura B e l'altra estremità nella presa di corrente con messa a terra.
- Collegare un'estremità del cavo video Y Pb Pr HD all'uscita Full HD della fig. B e l'altra estremità al monitor HD esterno (con Y Pb Pr). Poi collegare il cavo SVSH o video al monitor video standard o al software per colposcopia.

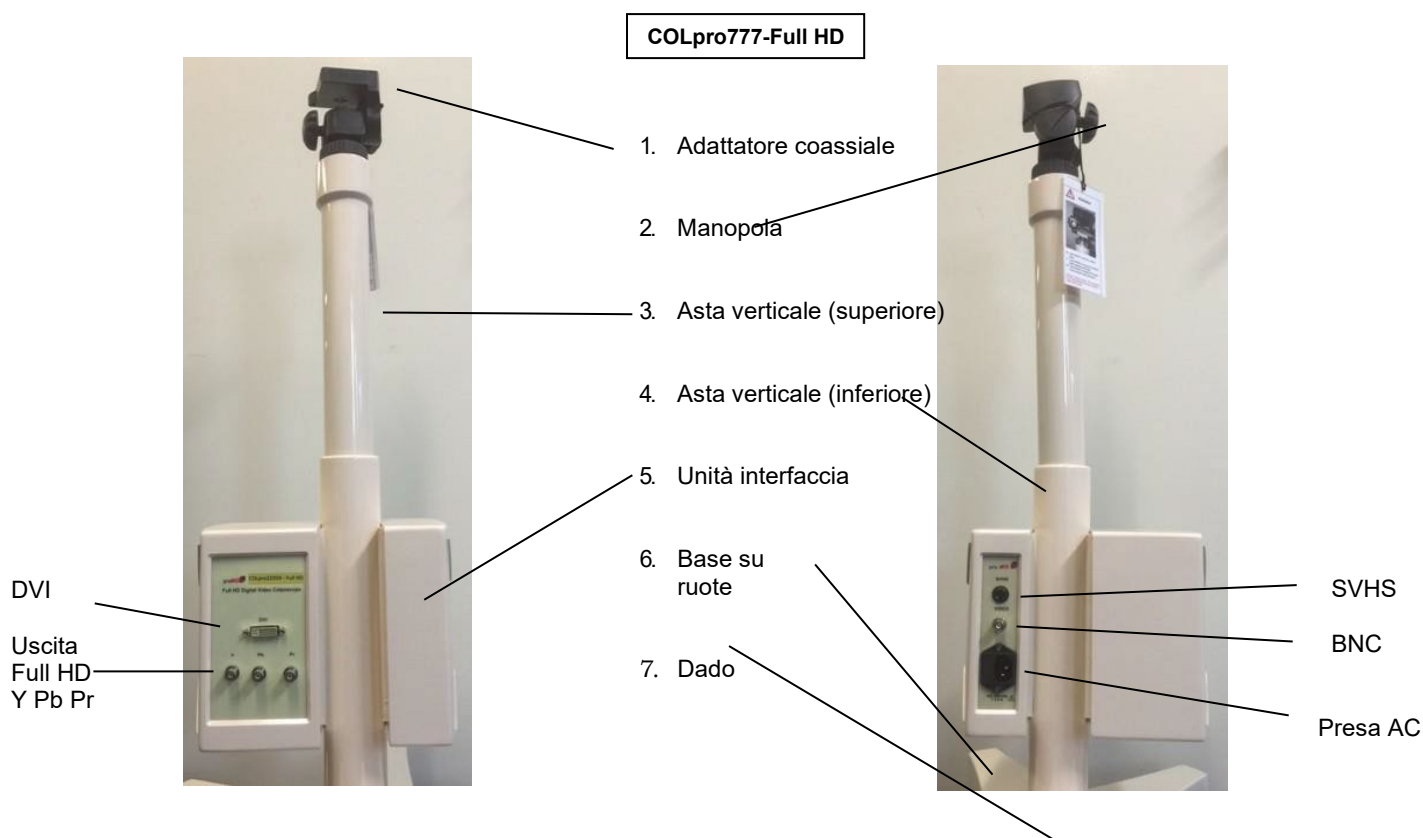

**Fig. A. Supporto verticale
Componenti unità
interfaccia**

Fig. B Unità interfaccia

FASE DI MONTAGGIO

FASE 1 Inserire la parte inferiore dell'asta verticale "FIGURA A.4" nel foro centrale della base su ruote "FIGURA A.6"



Fig. C - Fase 1

FASE 2 Avvitare il dado "FIGURA A.7"


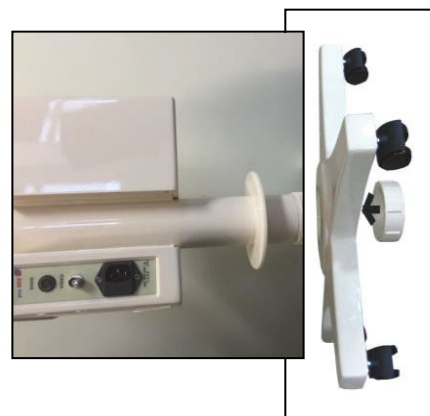


Fig. D - Fase 2

FASE 3 Appoggiare la parte inferiore dell'asta verticale "FIGURA A.4", serrare il dado "FIGURA A.7" ruotandolo in senso orario, in modo da fissare la base su ruote "FIGURA A.6" sulla parte inferiore dell'asta verticale "FIGURA A.4"

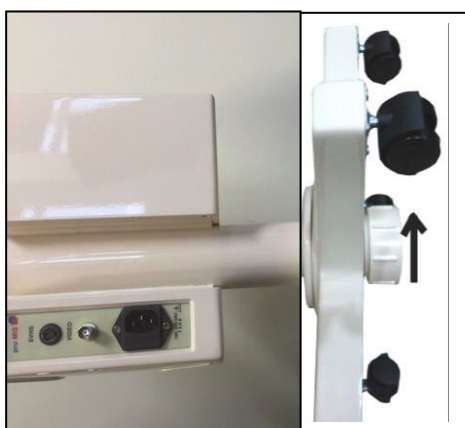

Fase 3

Fig. E - Fase 3

FASE 4 Infilare il cavo (grigio) della telecamera nel foro dell'adattatore coassiale "FIGURA A.1"



1° foro

2° foro

Figura di riferimento per la Fase 4

Assicurarsi di inserire il cavo della testina della telecamera prima nel 1° foro dell'adattatore coassiale e poi nel 2° foro, come mostrato nella figura di riferimento.

FASE DI MONTAGGIO

FASE 5 Far passare il cavo attraverso la parte superiore dell'asta verticale "FIGURA A.3" fino a quando fuoriesce. Non fissare ancora la telecamera all'adattatore coassiale, il cavo potrebbe torcersi.



Fig. G - Fase 5

FASE 6 Estrarre il cavo fuoriuscito durante la Fase 5 e collegarlo con cura al cavo che fuoriesce dalla parte inferiore dell'asta verticale "FIGURA A.3", come indicato. Assicurarsi che le due frecce, che contrassegnano i cavi, combacino.

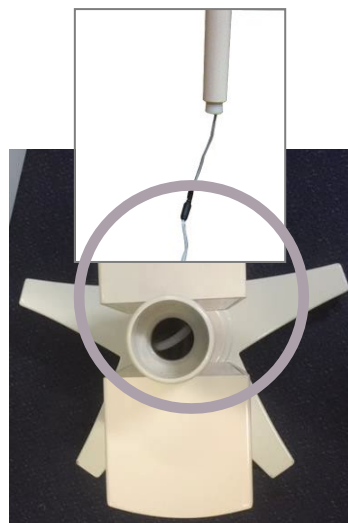


Fig. H - Fase 6

FASE 7 Ruotare la parte superiore dell'asta verticale "FIGURA A.3" in senso orario e collegarla alla parte inferiore dell'asta verticale "FIGURA A.4". Quindi ruotare la telecamera nella direzione di movimento del cavo, in modo da evitare di torcerlo o danneggiarlo.

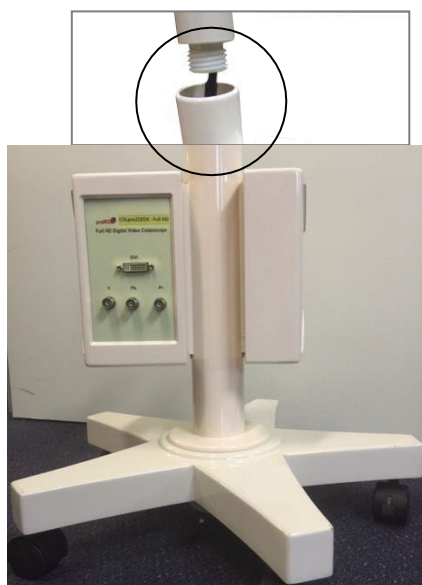


Fig. I - Fase 7


FASE 8 Estrarre di 90° l'impugnatura dell'adattatore coassiale, afferrare la maniglia della telecamera con attenzione e inserire la base di fissaggio (attaccata alla testina della telecamera) nell'adattatore coassiale. Una volta collegata la testina della telecamera, rilasciare l'impugnatura della piastra coassiale.



AVVERTENZA



1. Allentare la MANOPOLA 1 per inclinare la testina della telecamera.
2. Allentare la MANOPOLA 2 per spostare la testina della telecamera lateralmente (a destra e a sinistra).
3. Allentare la MANOPOLA 3 per regolare l'altezza della testina della telecamera (su e giù).

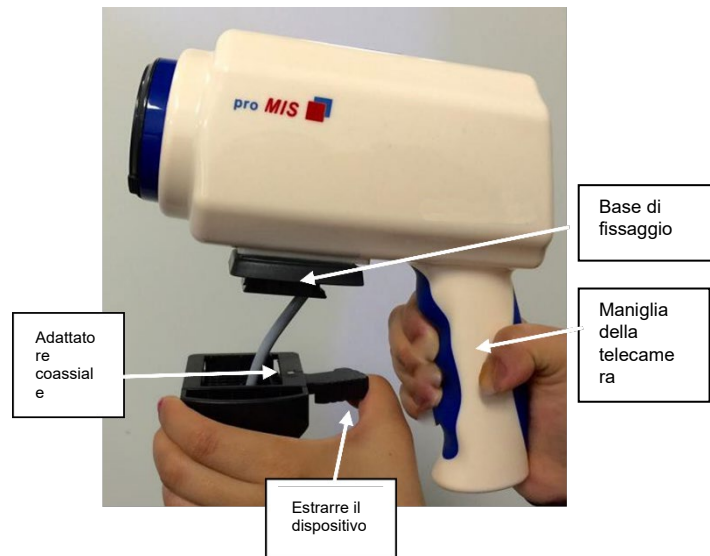








Fase 8

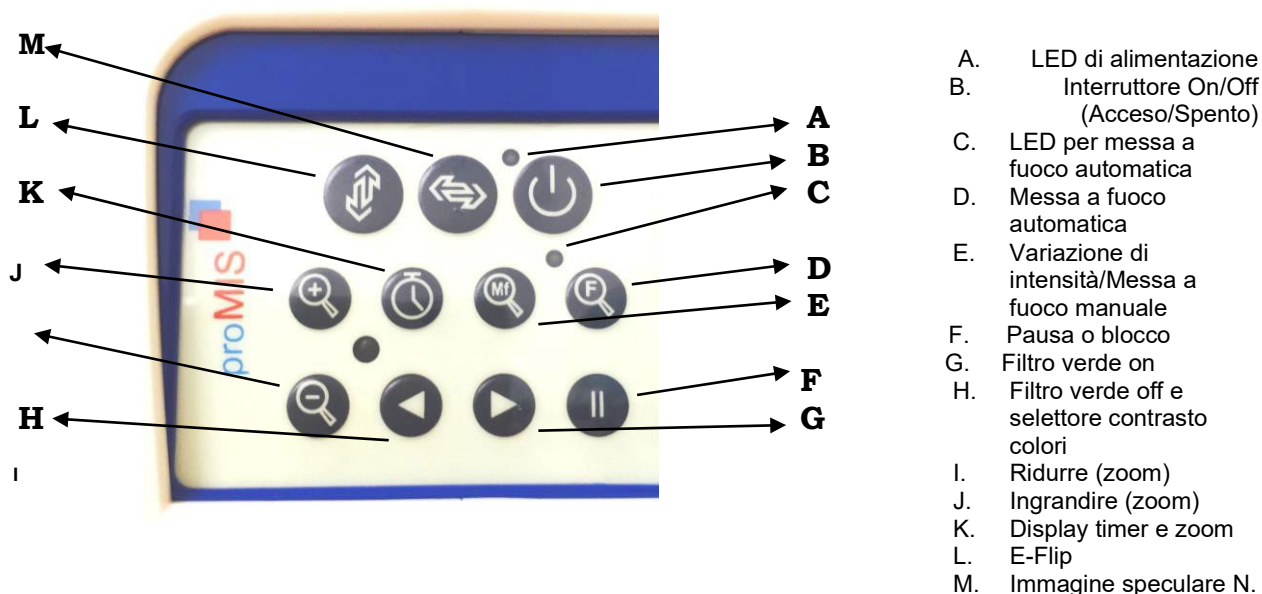






Collegare il cavo di alimentazione elettrica al connettore di corrente AC fornito sull'unità interfaccia. L'altra estremità del cavo di alimentazione deve essere collegata a una presa di corrente AC di tipo ospedaliero (100-240 VAC, 50/60 Hz). L'unità interfaccia ha uscite video SVHS, BNC, YPBPR e DVI per essere collegata ad appositi apparecchi video, come monitor medicali. Accendere l'interruttore principale sul pannello della testina della telecamera. Il sistema è pronto per l'uso.

PANNELLO DI CONTROLLO TESTINA DELLA TELECAMERA - FUNZIONI




	LED di alimentazione	Il LED vicino all'interruttore ON/OFF si illumina, quando si preme l'interruttore ON/OFF (B)
	Interruttore On/Off (Acceso/Spento)	Premere una volta per accendere la telecamera e l'illuminatore; premendo nuovamente si spegne.
	LED per messa a fuoco automatica	Se il LED vicino alla Messa a fuoco automatica si accende, significa che la telecamera è in modalità di messa a fuoco automatica. Quando si spegne, significa che il dispositivo è in modalità di messa a fuoco manuale. Quando la telecamera è in modalità di messa a fuoco automatica, cerca automaticamente l'oggetto e regola la nitidezza dell'immagine in base alla distanza tra il colposcopio e l'oggetto. Quando il LED si spegne, allora la telecamera è in modalità di messa a fuoco manuale: deve essere puntata verso il soggetto ed essere regolata manualmente per ottenere un'immagine più nitida.
	Messa a fuoco automatica	Con le impostazioni di default, l'unità è in modalità messa a fuoco automatica, il che significa che il LED (C) è acceso. Per attivare la modalità di messa a fuoco manuale, premere nuovamente il pulsante di messa a fuoco automatica. In questa modalità, il LED (C) si spegne.
	Variazione di intensità	a.: Quando il colposcopio è in modalità di messa a fuoco automatica (cioè il LED di messa a fuoco automatica è acceso), questo pulsante funziona come un selettore della modalità di intensità. Premendo questo pulsante è possibile scegliere tra 5 livelli di intensità. Il livello di intensità è indicato da I1, I2.....I5 sullo schermo. I1 è il livello più luminoso. b. Messa a fuoco manuale: Quando la telecamera è in modalità di messa a fuoco manuale (cioè il LED di messa a fuoco automatica non è acceso), premere questo pulsante per avviare la messa a fuoco manuale.
	Pausa o blocco	Questo pulsante consente di bloccare l'immagine che è necessario conservare per riesaminarla. Premendo nuovamente il pulsante, l'immagine si sblocca.
	Filtro verde ON	Premere questo pulsante per accendere il filtro verde e il sistema filtrerà automaticamente il tessuto rosso nell'immagine osservata e metterà in evidenza con maggiore intensità l'immagine vascolare. Inoltre si otterrà un eccellente contrasto di colore per visualizzare i campioni vascolari senza perdite di luminosità. Premendo questo pulsante è possibile selezionare uno dei 5 livelli del filtro verde. La prima volta che si preme questo pulsante, si passa dall'immagine Normale all'immagine Verde G1; dopodiché ogni volta che si preme questo pulsante si passa al successivo livello del Filtro verde. Lo stato del filtro verde è indicato da G1, G2.....G5 sullo schermo.
	Filtro verde OFF e selettore contrasto colore	Premere una volta per commutare da modalità filtro verde a modalità immagine normale. Premendo questo pulsante è possibile selezionare uno dei 5 livelli di colore dell'immagine normale. La prima volta che si preme questo pulsante, si passa dall'immagine verde all'immagine normale N1. Dopodiché ogni volta che si preme questo pulsante si passa al successivo livello di contrasti di colore che è indicato con N1, N2.....N5 sullo schermo

	Ridurre (zoom)	Premere questo pulsante per azionare lo zoom in riduzione
	Ingrandire (zoom)	Questo pulsante consente di azionare lo zoom per ingrandire le immagini fino a rendere più nitida la visione di tessuti e vasi.
	Display timer e zoom	Premere questo pulsante per avviare la visualizzazione dello stato di ingrandimento e il timer collegato al display. Premere nuovamente per interrompere questa funzione.
	E-Flip	La funzione E-flip consente di ruotare l'immagine sotto sopra per una migliore visualizzazione dei campioni vascolari.
	Immagine speculare	L'immagine speculare fornisce una vista laterale dell'immagine per una diagnosi migliore.

FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO

- A. Gamma ON
- B. Gamma OFF
- C. Ridurre (zoom)
- D. Ingrandire (zoom)
- E. Pausa
- F. Filtro verde ON
- G. Filtro verde OFF
- H. Messa a fuoco manuale
- I. Messa a fuoco automatica
- J. Display timer e zoom
- K. Immagine speculare
- L. E-Flip

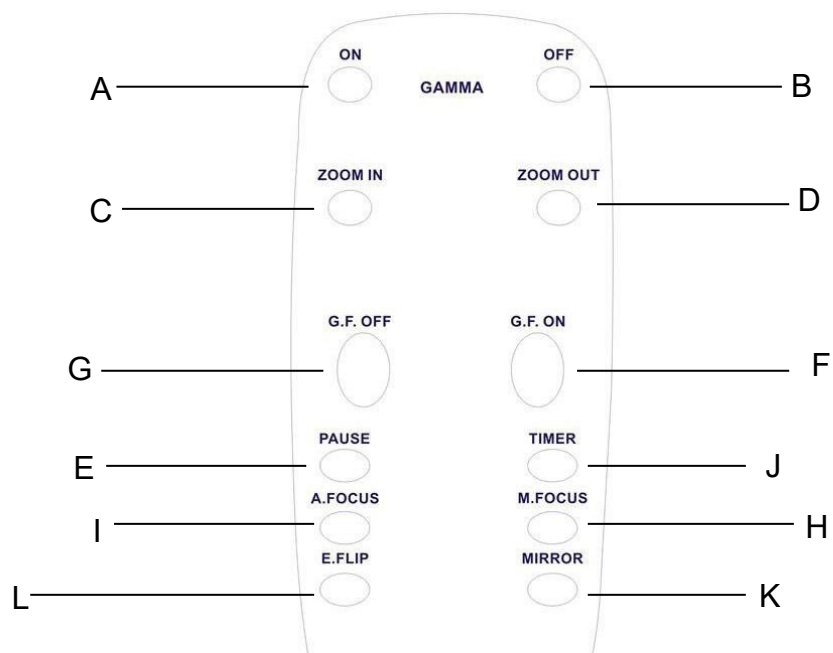

Cap. 5 SPECIFICHE TECNICHE

Processore immagine	SONY Color CCD
Pixel	≥ 200.000
Risoluzione	Full HD 1920 x 1080
E-Flip	Sì
Immagine speculare	Sì
Otturatore elettronico	automatico
Rapporto segnale/rumore.	> 50 db
Illuminazione	Elevata brillantezza luce bianca MCD meno ombre a LED
Temperatura del colore	7000oK
Timer test	Sì
Filtro verde elettronico	Sì
Messa a fuoco	automatica e manuale
Distanza di messa a fuoco	30 – 40 cm
Zoom	1 – 45x
Area di visualizzazione	φ 170 mm – 10 mm
Profondità di visualizzazione	φ 200 mm – 5 mm
Display ingrandimento	Sì
Uscita video	Full HD: Componente Y Pb Pr DVI Video standard: SVSH / Video
Normative di sicurezza	conforme alla norma IEC 60601, ivi compresa CEM
Processore gamma	opzionale (tramite comandi a distanza)
Accesso remoto (opzionale)	- per funzioni operative
Alimentazione	100-240 VAC, 50/60 HZ

SI No	Descrizione del pezzo		Osservazioni
1	Armadietto		
2	Alloggiamento metallico per la telecamera		
3	Illuminatore		
4	Unità microcontrollore		
5	Insieme dei cavi		
6	Pannello interfaccia		
7	Struttura di supporto con adattatore coassiale		
8	Modulo telecamera HD		
9	Cavo Y Pb Pr		
10	Cavo SVSH		
11	Cavo BNC		
12	Cavo di alimentazione	Australia	
		Europa	
		Sudafrica e India	
13	Alimentatore a tensione multipla		
14	Cavo DVI		

Detergente: Di seguito sono elencati esempi di disinfettanti che possono essere usati sul colposcopio:

1. ipoclorito di sodio diluito (agente sbiancante)
2. formaldeide diluita al 35%-37%
3. perossido di idrogeno 3%
4. alcol 75%
5. isopropanolo 70%

Il colposcopio video digitale può essere pulito con etanolo per uso ospedaliero e asciugato all'aria o con un panno pulito e fresco. **Fasi di pulizia:**

- spegnere la telecamera e il colposcopio, togliere l'alimentazione di corrente.
- Pulire la parte esterna e la struttura di supporto.
- Pulire i cavi di collegamento.
- Strofinare tutte le parti pulite con un panno asciutto.



Avvertenze

- Il colposcopio deve essere spento e scollegato dalla corrente prima di essere pulito.
- Non tentare di immergere nessuna parte del dispositivo in soluzioni detergenti.
- Non usare materiale abrasivo per pulire qualsiasi parte del colposcopio.
- Non usare solventi forti per pulire qualsiasi parte del colposcopio.
- Non lasciare residui della soluzione sul dispositivo; se dovesse capitare strofinare rapidamente con un panno inumidito con acqua.

MANUTENZIONE:

Prima di utilizzare il colposcopio, verificare:

- la presenza di danni meccanici
- tutti i cavi esterni, i componenti e gli accessori
- tutte le parti di collegamento con la paziente e assicurarsi che siano in perfette condizioni di funzionamento.
- Qualora venissero riscontrati danni, contattare il produttore o il servizio tecnico autorizzato.

Durante il controllo del sistema, prestare attenzione a quanto segue:

- eseguire un esame visivo per assicurarsi che non ci siano parti danneggiate.
- Accertarsi che non vi siano danni tra la presa e il cavo e che tutte le spine e le prese non siano staccate.
- Controllare se il collegamento tra supporto verticale, monitor e telecamera è corretto e non danneggiato.
- Controllare che il cavo non sia interrotto muovendo ognuna delle sue estremità.

Manutenzione della testina della telecamera

- La testina della telecamera è una parte importante del colposcopio; particelle di polvere possono accumularsi su di essa e influire sulla prestazione del colposcopio; eventuali impronte sulle lenti della telecamera potrebbero ridurre la qualità dell'immagine e danneggiare il rivestimento delle lenti, quindi devono essere eliminate/pulite immediatamente.
- Usare una spazzolina morbida per pulire la telecamera.
- Lasciare cadere una goccia di soluzione detergente su carta di cotone da utilizzare per pulire la superficie della telecamera.

Manutenzione dell'unità

- Non tentare di immergere nessuna parte del dispositivo in soluzioni detergenti.
- Non usare materiale abrasivo per pulire qualsiasi parte del colposcopio.
- Non usare solventi forti per pulire qualsiasi parte del colposcopio.
- Non lasciare residui della soluzione sul dispositivo; se dovesse capitare strofinare rapidamente con un panno inumidito con acqua.

Il nuovo colposcopio video digitale COLpro777-FullHD di Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) è soggetto a ogni diritto statutario o a tutela e alle condizioni di garanzia riportate in seguito ed è espressamente garantito da Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) come privo di difetti e conforme alle descrizioni e caratteristiche tecniche descritte nel presente documento per un periodo di 1 anno dalla data di consegna originale dell'unità COLpro777-FullHD da parte nostra o del Rivenditore o del Rappresentante al cliente.

La garanzia si applica esclusivamente su un acquisto originale internazionale effettuato presso di noi o presso il Rivenditore o il Rappresentante.

Questa garanzia non copre danni per malfunzionamento o guasti risultanti dall'uso del COLpro777-FullHD non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale utente, incidenti, uso o applicazione impropri, riparazione inadeguata o non autorizzata, negligenza, modifiche o uso di accessori non autorizzati o di voltaggio inadeguato.

La garanzia sarà nulla se la targa identificativa o il numero seriale sono stati modificati o rimossi. Fatta salva ogni garanzia di legge, che non può essere esclusa e la garanzia specificatamente prevista come sopra riportata, Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) non concede garanzie o coperture di alcun tipo sul COLpro777- FullHD o parti del COLpro777-FullHD e ogni altra garanzia, copertura, rappresentanza, espressa o implicita, che sia esclusa dal presente documento.

Per ottenere assistenza in garanzia, contattare Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) (consultare le informazioni sulla prima pagina).












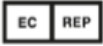

Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) sopperirà a eventuali guasti in garanzia sostituendo o riparando il COLpro777-FullHD. La responsabilità di Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) è limitata alla responsabilità di risarcire al cliente un importo uguale al costo per la sostituzione del COLpro777-FullHD, oppure al costo della riparazione dello stesso, a seconda di quale tra i due importi è quello inferiore.

Nei casi previsti dalla legge, il cliente non intenterà cause né azioni legali in nessun caso contro Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA) per o rispetto a eventuali negligenze o perdite economiche sulle quali si è fatto affidamento, o eventuali perdite, danni o lesioni indiretti o consequenziali, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo perdite, danni o lesioni connesse a una diagnosi non corretta determinata da o connessa all'uso o alla fornitura del COLpro777-FullHD o di qualsiasi sua parte.












Il cliente prende espressamente atto e conferma che:

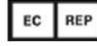- a. il COLpro777-FullHD è un dispositivo medico tecnico ed è responsabilità del medico fornire la diagnosi clinica finale e il trattamento al paziente basandosi su tutte le informazioni che ha a disposizione sulla paziente.
- b. Il COLpro777-FullHD ha lo scopo di assistere il medico, non di fornirgli un'analisi conclusiva né di sostituire il giudizio del medico rispetto alla diagnosi e al trattamento; e
- c. a tutti gli utilizzatori del COLpro777-FullHD sarà richiesto di informare le pazienti riguardo a tali limitazioni.

Con l'apertura dell'imballaggio del COLpro777-FullHD, si riterrà che i clienti hanno letto, compreso e accettato integralmente tutti i termini di garanzia e le condizioni sopra riportati. Se il cliente non accetta i termini di garanzia e le condizioni di cui sopra nella loro interezza, è pregato di contattare Divine Meditech Pvt Ltd (INDIA).

	Divine Meditech Private Limited G-197, Sector-63, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh – 201301 India Made in India			
	Meddevices Lifesciences B.V. Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam, the Netherlands	 		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">  COLpro777Full-HD (GIMA 29622) </td> <td style="width: 70%; border: none; text-align: right;"> Video Colposcopio Digitale - Full HD Digital Video Colposcope - Full HD </td> </tr> </table>			 COLpro777Full-HD (GIMA 29622)	Video Colposcopio Digitale - Full HD Digital Video Colposcope - Full HD
 COLpro777Full-HD (GIMA 29622)	Video Colposcopio Digitale - Full HD Digital Video Colposcope - Full HD			
 <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block; margin-left: 5px;"></div>				
 YYYY-MM	  	IMPORTATO DA / IMPORTED BY: GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy www.gimaitaly.com		
AC Input: 100-240 VAC, 50/60Hz				

Rev.0-01/2023

	Fabbricante		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Dispositivo medico
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Seguire le istruzioni per l'uso
	Smaltimento RAEE		Parte applicata di tipo B
	Codice prodotto		Numero di serie
	Dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745		

		CAVO DI ALIMENTAZIONE
		CAVO SVHS
		CAVO BNC
		CAVO YPBPR
		CAVO DVI
		TELECOMANDO
		<p>CD DI INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E CHIAVETTA USB (LICENZA PER ESEGUIRE IL SOFTWARE)</p> <p>: <u>PARTE DEL SOFTWARE</u></p>
		<p>INTERRUTTORE A PEDALE USB CON PROLUNGA</p> <p>: <u>PARTE DEL SOFTWARE</u></p>
		<p>SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO</p> <p>: <u>PARTE DEL SOFTWARE</u></p>

Avvertenza: È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Informazioni di contatto:
Divine Meditech Pvt Ltd.
G-197, Sector-63, Gautam Buddha Nagar
Uttar Pradesh, India-201301
Info@divinemeditech.in