

REF. 0111 e 0111/L

PINZETTA OMBELICALE MONOUSO

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE:

- Il dispositivo è fornito sterile.
- Non utilizzare se la confezione non si presenta integra.
- Utilizzare immediatamente dopo l'apertura dell'involucro.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato.
- Da utilizzare solo per il cordone ombelicale.
- Il prodotto è monouso. Non utilizzare dopo l'uso.

INDICAZIONI D'USO

Il dispositivo è inteso per l'utilizzo in ostetricia la chiusura del cordone ombelicale.

MODALITÀ D'USO

Rimuovere il prodotto dalla busta sterile.

Posizionare due pinzette ombelicali sul cordone, l'una a circa dieci centimetri dal corpo del neonato, l'altra a circa quindici centimetri (la distanza tra una pinzetta e l'altro deve risultare di circa cinque centimetri).

Prendere con due dita le due estremità di chiusura della pinzetta e dopo averla posta sul cordone ombelicale, stringere fino allo scatto di bloccaggio.

ASSICURARSI CHE LA PINZETTA SIA SERRATA ED I FERMI SIANO BEN INCASTRATI TRA LORO.

Tagliare il cordone ombelicale ancora attaccato alla placenta (la placenta viene espulsa naturalmente al massimo venti minuti dopo l'uscita del bambino).

La pinzetta può essere rimossa solo tranciando la parte posteriore della stessa.

AVVERTENZE

- Controllare periodicamente a brevi intervalli di tempo l'uno dall'altro, la tenuta della pinzetta sul neonato fino a quando il cordone non si è cicatrizzato.

- In caso di impossibilità di controllo continuo si consiglia di applicare un'ulteriore pinzetta di sicurezza.

CONSERVAZIONE / IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto. Non esporre a temperature superiori a 50° C.

ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO

Il prodotto è monouso quindi non è riutilizzabile, può venire scaricato oppure bruciato insieme con altri rifiuti, osservando le disposizioni delle Autorità Locali. L'eliminazione per incenerimento non dà luogo a formazione di residui tossici.

