



Via Del Chioso n.8
24030 MOZZO (BG) - ITALY
Tel.: ++39/035/4376456
Fax: ++39/035/617844
E-mail: gps@gpsmedical.com
website: www.gpsmedical.com

PINZETTA OMBELICALE STERILE ISTRUZIONI D'USO

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Il dispositivo è monouso. La sterilità è garantita a confezione integra. Usare immediatamente dopo l'apertura della confezione.

Verificare l'integrità del gancio di chiusura prima dell'utilizzo; in caso di anomalie non utilizzare il dispositivo.

Per una maggiore sicurezza utilizzare due pinzette ombelicali

Posizionare le pinzette ombelicali sul cordone, una a circa dieci centimetri dal corpo del neonato, l'altra a circa quindici centimetri (la distanza tra una pinzetta e l'altra deve risultare di circa cinque centimetri).

Prendere con due dita le due estremità di chiusura della prima pinzetta e dopo averla posta sul cordone ombelicale, stringere fino allo scatto di bloccaggio.

Assicurarsi che le pinzette siano serrate ed i fermi siano ben incastrati tra loro.

Tagliare il cordone ombelicale.

La pinzetta può essere rimossa solo tranciando la parte posteriore della stessa.

Condizioni di rischio: può causare al neonato delle perdite di sangue dal cordone ombelicale.

Smaltimento: distruggere dopo l'utilizzo in accordo alle norme vigenti. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico specializzato.

