


REF: 0120 PERFORATORE DI MEMBRANA AMNIOTICA

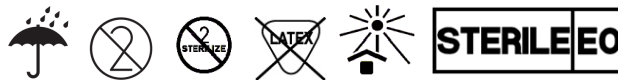

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE

- Il dispositivo è fornito sterile.
- Non utilizzare se la confezione non si presenta integra.
- Utilizzare immediatamente dopo l'apertura dell'involucro.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato.
- Il prodotto è monouso. Non utilizzare dopo l'uso.

INDICAZIONI D'USO

Il dispositivo è inteso per l'effettuazione di amnioressi cioè di quei casi in cui sia necessario causare una rottura artificiale delle membrane. L'amnioressi viene praticata durante il travaglio (sarebbe meglio non effettuarla prima che la dilatazione del collo dell'utero abbia raggiunto almeno 4-5 cm) per facilitare l'inizio del periodo espulsivo del parto.

MODALITÀ D'USO

Introdurre l'Hospital's Break in vagina, guidandolo in posizione con l'ausilio dell'indice ed il medio dell'altra mano. Rompere le membrane esercitando con l'estremità distale del dispositivo una leggera pressione verso l'alto. Fare lentamente defluire il liquido amniotico per evitare di favorire rischi di prolasso del funicolo o il distacco della placenta. Quando le membrane sono addossate alla parte presentata, è bene, utilizzare uno speculum vaginale oppure un amnioscopio eseguendo l'amnioressi sotto controllo visivo per essere certi di non provocare lesioni al feto o alla madre

CONSERVAZIONE / IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto. Non esporre a temperature superiori a 50° C.

ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO

Il prodotto è monouso quindi non è riutilizzabile, può venire scaricato oppure bruciato insieme con altri rifiuti, osservando le disposizioni delle Autorità Locali.

L'eliminazione per incenerimento non da luogo a formazione di residui tossici.

