PESSARY PESSARIO PESSAIRE PESSAR PESARIO PESSÁRIO ΠΕΣΣΟΣ ПЕСАР PESAR

PESAR NIJE STERIL NO **PESSZÁRIUM** PESĂRIIS PESSARIUM PESSAR PESAR VAGINAL PESAR

GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046 30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043



Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China Made in China



REF PERO0 - PERO1 - PERO2 - PERO3 - PERO4 - PERO5 - PERO6 - PERO7 - PERO8 PERO9 - PERSO0 - PERSO1 - PERSO2 - PERSO4 - PERSO5 - PERSO6 - PERSO7 PERSON - PERSON - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7 PECUDO0- PECUDO1 - PECUDO2 - PECUDO3 - PECUDO4 - PERSO3







Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitalv.com



# Istruzioni per l'uso

Il pessario flessibile in silicone è utilizzato comunemente in caso di prolasso uterino lieve di primo o secondo grado o di procidenza. I pessari sono realizzati al %100 in silicone per uso medico. I pessari sono progettati per buso su una singola paziente.

### ATTENZIONE

La normativa nazionale prevede che il dispositivo sia prescritto da un medico.

# CONTROINDICAZIONI

I pessari sono controindicati in caso di infezioni acute del tratto genitale, infezioni pelviche o pazienti non collaboranti.

#### PROCEDURE

L'individuazione di un pessario della dimensione adatta richiede solitamente una prova delle varie dimensioni disponibili. Il Set di pessari di prova è un valido ausilio alla scelta del pessario corretto. Prima di inserire il pessario, per un maggiore comfort della paziente potrebbe essere necessario un lubrificante vaginale. Il medico può suggerire K-Y jelly o un equivalente.

Il medico deve determinare se la paziente necessita di terapia estrogenica prima di prescrivere un pessario. 1. Eseguire un normale esame pelvico prima di provare e introdurre un pessario. L'esame

- pelvico ajuta a determinare la dimensione appropriata. Il pessario si piegherà facilmente sui fori di drenaggio più grandi per semplificare binserimento e la rimozione. Il pessario dovrebbe essere abbastanza grande perché sia indicato, ma non deve causare un senso di pressione o disagio inopportuno.
- Comprimere il pessario e inserirlo delicatamente attraverso bintroito. Quando il pessario. ha superato bintroito, rilasciare il pessario compresso in modo che si espanda fino alla sua forma normale
- 3. Spostare delicatamente il pessario verso la cervice per sostenere il cistocele o il rettocele e butero. Se è nella posizione corretta, il medico dovrebbe essere in grado di inserire un dito per lesame tra il bordo esterno del pessario e la parete vaginale. Tale margine di spazio garantirà il comfort della paziente e ridurrà il rischio di necrosi da pressione.
- 4. Una volta in posizione, il pessario non dovrebbe spostarsi guando si è in piedi, sedute. accovacciate o si portano pesi. Non deve risultare scomodo per la paziente durante una qualsiasi di queste attività di routine.





- 5. Se è la paziente a doversi occupare del pessario, assicurarsi di istruirla adequatamente in merito alla pulizia, all'inserimento e alla rimozione.
- 6. Dire alla paziente di segnalare immediatamente qualsiasi disagio o difficoltà nell'urinare o defecare.

# RIMOZIONE, PULIZIA E VISITE DI FOLLOW-UP SUGGERITE

- 1. Per rimuovere il pessario, spostarlo in avanti verso bintroito con cautela. Quando il pessario è a portata di mano, comprimerlo ed estrarlo con attenzione.
- 2. Il pessario può essere pulito con sapone neutro e acqua calda. La durata douso del pessario è limitata. Esaminare il pessario per verificare che non siano presenti segni di deterioramento.
- I rapporti sessuali sarebbero controindicati a pessario inserito.
- 4. Discutere con la paziente delbimportanza di seguire le istruzioni e della durata d'uso prevista del pessario.
- 5. Assicurarsi entro 48-24 ore che la paziente non sia allergica al pessario. Esaminare la vagina e chiedere alla paziente se ha avvertito disagio, irritazione, pressione, sensibilità o se si sono verificate perdite vaginali insolite. Determinare altresì se vi sono stati miglioramenti nei suoi sintomi personali.
- 6. Programmare le visite di follow-up in base alle esigenze della paziente e in conformità alle regolamentazioni locali.

#### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.





## SIMBOLI - DESCRIZIONI

[]i	Leggere le istruzioni per l'uso	LOT	Numero di lotto
***	Fabbricante	REF	Codice prodotto
	Data di fabbricazione	<b>*</b>	Conservare in luogo fresco ed asciutto
CE	Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE	*	Conservare al riparo dalla luce solare
<u>^</u>	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	(Pathet)	Latex free
$\square$	Data di scadenza	NON STERRLE	Non sterile
2	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Importato da