



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

www.led.it

IT 00900.FST - Filtro ULPA per prima fornitura (5h) - BLU
00900.FU01 - Filtro ULPA per SURTRON EVAC (20h) - RED



Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo.
Prodotto monouso. Non riutilizzare.
Non aspirare liquidi.
Il prodotto deve essere smaltito secondo le procedure per il controllo dei rifiuti pericolosi.
Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.

Il prodotto è compatibile per l'utilizzo con aspiratori di fumi chirurgici SURTRON® EVAC (10200.10 - 10200.10/115V).

Per la connessione vedere istruzioni dell'unità di aspirazione fumi chirurgici SURTRON® EVAC.

Caratteristiche tecniche


Tipo filtro: ULPA con carboni attivi
Efficienza filtro: 99,999X%
Diametro particelle: 0,12 micron
Diametro attacco tubo uscita: 22 mm
Durata filtro 00900.FST: 5 ore
Durata filtro 00900.FU01: 20 ore

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT TR IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

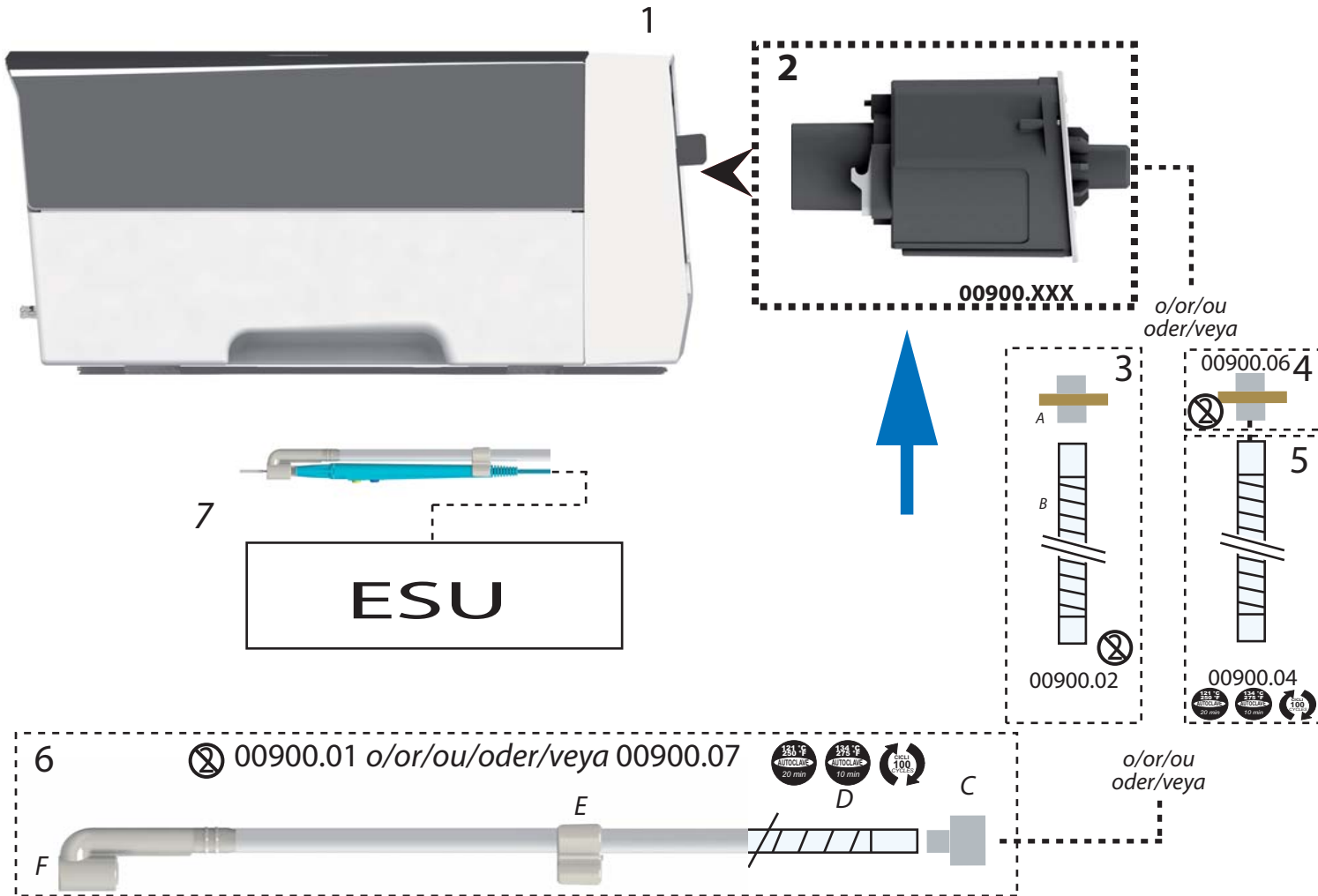

- 1 UNITA' DI ASPIRAZIONE FUMI* serie10200. 10 - 10200.10/115V
- 2 FILTRO serie 00900.XXX
- 3 KIT ASPIRAZIONE (00900.02)* - A Filtro B - Tubo dia. 22mm Lunghezza 2.4 mt
- 4 Filtro dia.22 mm (00900.06)*
- 5 Tubo autoclavabile dia. 22mm (00900.04)*
- 6 KIT DI ASPIRAZIONE MANIPOLO (00900.01 o 00900.07)* - C Adattatore 10mm/22mm - D Tubo Lunghezza 1.5 mt - E Clip - F Adattatore per manipolo
- 7 Particolare del manipolo* con 00900.01 o 00900.07, il manipolo deve essere connesso alla vostra unità elettrochirurgica (ESU*). *non fornito



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST



LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA