

DESCRIZIONE ED INDICAZIONI

La confezione di vendita del prodotto **NON È STERILE**.

CAVI DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA CON ATTACCO A LINGUETTA

I cavi sono dotati di attacco a pinza e dall'altro lato di diversi connettori che rendono i cavi compatibili con molti elettrobisturi.

MODELLI F7902 – F7902-S – F7904 – F7902/3MT

Cavo di collegamento con attacco Jack mono Ø 6,3 mm

MODELLI F7903

Cavo di collegamento con attacco tipo Valleylab

MODELLI F7902/4

Cavo di collegamento con terminale maschio Ø 4,0 mm

MODELLI F7902/24

Cavo di collegamento con 2 terminali maschio Ø 4,0 mm

MODELLI F7903/F

Cavo di collegamento con attacco tipo Valleylab per modelli Force 1-2-4-4B

CAVI DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE RIUTILIZZABILI PER ELETTROCHIRURGIA CON ATTACCO FEMMINA 4MM

I cavi sono dotati di terminali di sicurezza 4mm per il collegamento alle piastre e dall'altro lato di diversi connettori che rendono i cavi compatibili con molti elettrobisturi.

MODELLI F7922 – F7924

Cavo di collegamento con attacco Jack mono Ø 6,3 mm

MODELLI F7923

Cavo di collegamento con attacco tipo Valleylab

MODELLI F7922/4

Cavo di collegamento con terminale maschio Ø 4,0 mm

MODELLI F7922/24

Cavo di collegamento con 2 terminali maschio Ø 4,0 mm

MODELLI F7923/F

Cavo di collegamento con attacco tipo Valleylab per modelli Force 1-2-4-4B

MODALITÀ D'USO

Verificare l'integrità della confezione, dei cavi e delle loro connessioni: in presenza di danni e difetti visibili non utilizzare il prodotto.

Collegamento di cavi con pinza:

- alzare la levetta mobile posta sulla parte in plastica azzurra della pinza
- introdurre la linguetta della piastra monouso all'interno del ricettacolo presente nella parte plastica azzurra della pinza
- riportare la levetta in posizione di riposo

Collegamento di cavi con spinotti maschio 4mm:

- Collegare gli spinotti ai fori presenti sulla piastra.
- Durante l'inserzione la guaina di protezione presente sulla punta dello spinotto si retrae in modo da consentire il collegamento alla piastra

AVVERTENZE

- collegare la pinza alla linguetta della piastra monouso facendo attenzione di posizionare la pinza al di fuori della zona coperta con gel
- **Il prodotto è fornito non sterile**
- Le apparecchiature e le piastre utilizzate con il presente prodotto devono essere conformi alle normative vigenti

NB: I prodotti devono essere utilizzati da personale sanitario qualificato.

Mai scollegare i cavetti esercitando trazioni sul corpo del cavo stesso

PULIZIA

La pulizia dei cavi può essere effettuata con un panno morbido imbevuto di soluzione disinfettante.

VITA DEL PRODOTTO

La vita del prodotto è conseguenza del numero di utilizzi e dello stato di manutenzione e conservazione del prodotto stesso. Non appena si osservino deterioramenti dei materiali il prodotto dovrà essere eliminato.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto deve essere conservato nella sua confezione originale in locali caratterizzati da condizioni ambientali, di temperatura ed umidità relativa, specificate nella etichetta posta sulla confezione. La sovrapposizione di pesi sulle confezioni potrebbe danneggiare il prodotto.

NOTE GENERALI

Se durante o in seguito all'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali. Per qualunque malfunzionamento o difetto del dispositivo, informare il Servizio Qualità del Fabbrikante.

SMALTIMENTO

I rifiuti provenienti da strutture sanitarie devono essere smaltiti secondo le vigenti normative.

	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Achtung, Gebrauchsanweisung lesen	Atención, leer atentamente las instrucciones	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atenção, ler atentamente as instruções	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças	Počet kusů