

NEUTRAL

REF 00401.01

Elettrodo neutro in acciaio 120x160mm con cavo 3 mt

LOT 000000



YYYY-MM



Dimensioni 120x160mm (190cmq)

DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivi medici riservati all'uso di personale medico specializzato destinati ad uso temporaneo per interventi chirurgici, in cui tramite collegamento ad unità elettrochirurgiche, si richiede il taglio e/o la coagulazione di tessuti molli, con tecnica monopolare e/o bipolare, per chirurgia minore e/o maggiore in aperto e / o intraoperatorio percutaneo e / o endoscopico e / o laparoscopico.

UDI



8 0336383 22949



(1) Area d'intervento - Treatment area

IA00401.00_a_IT ed. 2023-02

AVVERTENZE:

Le seguenti precauzioni hanno lo scopo di ridurre il rischio di ustioni accidentali.

- L'elettrodo neutro deve essere collegato in modo affidabile su tutta l'area al corpo del paziente, preferibilmente alle estremità, il più vicino possibile al punto di intervento. Evitare di collegare l'elettrodo neutro su sporgenze ossee, protesi, tessuti cicatriziali, zone soggette ad accumulo di liquidi o che presentano uno spesso stato di tessuto adiposo sottocutaneo. La zona di applicazione deve essere priva di peli, asciutta e pulita. Per la pulizia della pelle non utilizzare alcool. Tranne per uso veterinario è sconsigliato l'utilizzo di gel per elettrodi.

- Un evidente basso livello in uscita o un funzionamento non corretto dell'unità, quando sia predisposta per una normale erogazione di potenza, può indicare un'applicazione difettosa dell'elettrodo neutro o un cattivo contatto nelle connessioni dello stesso. Per questo, l'applicazione dell'elettrodo neutro ed i relativi collegamenti dovrebbero essere controllati prima di selezionare una potenza più alta. In caso di necessità all'utilizzatore e/o paziente devono segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

PULIZIA:

Lavare con acqua corrente subito dopo l'intervento e poi immergere per 45 min. in una soluzione al 2% di un normale prodotto disinfettante.

CE 0051



LED SpA Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (FR) - ITALY



MADE IN ITALY