

FOOTSWITCH

REF 00305.01

1-2 cut
2-3 coag
4/7 nc

IP 67
WATER PROOF



UDI



EXPLOSION
PROOF



MADE IN ITALY

cable 5 mt



50°C

20%

80%

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-01b_ML1
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

IT PEDALIERA DOPPIA STAGNA (240-380)

Il prodotto è fornito per il comando a pedale di unità elettroniche compatibili.

Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo scartare i prodotti difettosi.

Il presente prodotto è compatibile con le versioni di apparecchiature che lo prevedono, fate riferimento alle istruzioni dell'unità.

Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.

Installazione:

- inserire il connettore del prodotto sul connettore specifico dell'unità elettronica, facendo attenzione al verso d'inserimento (fig. A -part. 1-2).
- per bloccare il prodotto sull'unità ruotare la ghiera (fig. A - part. 3).

Accendere l'unità ed effettuare delle prove di funzionamento agendo sul pedale (fig. A part 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



IT PREMERE = ATTIVAZIONE / RILASCIO = NO ATTIVAZIONE
GIALLO = TAGLIO / BLU = COAGULAZIONE