


FOOTSWITCH UDI 8 03 36 38 3 2 0 7 3 0

REF 00305.04 L-E cut N-E coag IP 67 WATER PROOF 1

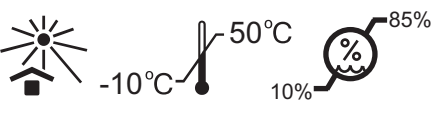

cable 5 mt LED SpA Via M.T.Cicerone 138 03100 Frosinone (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT PL IA00305-04W_ML1 ed. &68 %' 20'' (C) LED SpA

IT PEDALIERA DOPPIA STAGNA (300-400)

Il prodotto è fornito per il comando a pedale di unità elettroniche compatibili.

Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo scartare i prodotti difettosi.

Il presente prodotto è compatibile con le versioni di apparecchiature che lo prevedono, fate riferimento alle istruzioni dell'unità.

Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.

Installazione:

- inserire il connettore del prodotto sul connettore specifico dell'unità elettronica, facendo attenzione al verso d'inserimento (fig. A -part. 1-2).
- per bloccare il prodotto sull'unità ruotare la ghiera (fig. A - part. 3).

Accendere l'unità ed effettuare delle prove di funzionamento agendo sul pedale (fig. A part 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



IT PREMERE = ATTIVAZIONE / RILASCIO = NO ATTIVAZIONE GIALLO = TAGLIO / BLU = COAGULAZIONE