

FOOTSWITCH

REF 00305.06_S

1-2 cut
2-3 coag
4-5 cc
6 nc

SURGEON

IP 67
WATER PROOF

1

UDI 8 033638 325124

EXPLOSION PROOF

cable 5 mt

MD

MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

50°C
-10°C
85%
10%

IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-06_Sc_ML1
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

IT PEDALIERA DOPPIA STAGNA (TOUCH / TOUCH HP 300-400)

Il prodotto è fornito per il comando a pedale di unità elettroniche compatibili.

Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo scartare i prodotti difettosi.

Il presente prodotto è compatibile con le versioni di apparecchiature che lo prevedono, fate riferimento alle istruzioni dell'unità.

Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.

Installazione:

- inserire il connettore del prodotto sul connettore specifico dell'unità elettronica, facendo attenzione al verso d'inserimento (fig. A-part. 1-2).
- per bloccare il prodotto sull'unità ruotare la ghiera (fig. A - part. 3).

Accendere l'unità ed effettuare delle prove di funzionamento agendo sul pedale (fig. A part 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



IT PREMERE = ATTIVAZIONE / RILASCIO = NO ATTIVAZIONE
GIALLO = TAGLIO / BLU = COAGULAZIONE