

LAMPADA LED DI INGRANDIMENTO

1. Attenzione:

- 1) Non usare in ambienti umidi (ad esempio nel bagno). Pulire la pelle prima dell'uso.
- 2) Spegnerla dopo l'uso.
- 3) Scollegarla dall'alimentazione se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Pulire la testa della lampada e coprirla per garantirne una corretta conservazione.
- 4) Pulire la lente con carta morbida specifica per la pulizia delle lenti. Non pulire con panni o tipi di carta diversi, poiché la lente potrebbe danneggiarsi.
- 5) Evitare che l'interruttore di regolazione della luminosità entri in contatto con acqua o altri liquidi durante l'installazione del dispositivo.
- 6) Evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi.
- 7) In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione con morbida guaina esterna, richiederne la sostituzione da parte del produttore, di un tecnico dell'assistenza o di personale con una qualifica simile, per evitare possibili rischi.
- 8) AVVERTENZA "⚠" (IEC 60417-6042): La sorgente luminosa può essere sostituita unicamente dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da personale con una qualifica simile.

2. Istruzioni:

Questa lampada evidenzia cambiamenti sulla superficie della pelle umana, consentendovi di esaminare i minimi dettagli. Garantisce dunque un'efficacia superiore durante i trattamenti per la cura e la bellezza del viso.

La funzione di ingrandimento del prodotto può essere utilizzata anche per trattamenti di bellezza particolari, quali il tatuaggio di sopracciglia e contorno labbra, l'allungamento delle ciglia, ecc.

La lente di ingrandimento può essere utilizzata anche senza la base di supporto, o in combinazione con altri dispositivi.

Questo dispositivo è caratterizzato da un design innovativo e un profilo elegante. È pensato per garantire la sicurezza ed evitare il rischio di schiacciamento durante l'uso. La lente di ingrandimento è realizzata in vetro ultra bianco da 3 diottrie, per un migliore effetto visivo senza distorsione.

3. Specifiche tecniche:

1) Per l'alimentazione di ingresso, fare riferimento alla tabella di seguito riportata:

Tensione nominale (V)	100~240V
Frequenza nominale (HZ)	50/60Hz

2) Potenza nominale e illuminazione: (illuminazione testata ad una distanza di 20cm)

- Livello 1: 2,5W, 950 LUX
- Livello 2: 3,5W, 1400 LUX
- Livello 3: 5,0W, 1900 LUX
- Livello 4: 7,0W, 2400 LUX


3) Peso netto: 12,8 kg

4) Peso Lordo: 15 kg


5) Dimensioni della confezione: 83,5cm x 69,5cm x 13,5cm

4. Istruzioni per l'uso:

- 1) Collegare la lampada a luce fredda ad una sorgente di alimentazione.
- 2) Portare l'interruttore di alimentazione su ON, sollevare il coperchio antipolvere sulla parte superiore e dirigere la lente di ingrandimento sulla superficie della pelle che deve essere esaminata o sottoposta al trattamento di bellezza.
- 3) Regolare la distanza tra la lampada a luce fredda e la pelle (la distanza ideale per ottenere il migliore effetto visivo è di 10~20cm) in modo da avere la giusta luminosità. (La lampada può essere regolata a 4 livelli di luminosità, come di seguito descritto.)
- 4) Esaminare la pelle o iniziare il trattamento di bellezza. La luminosità può essere regolata durante l'uso.

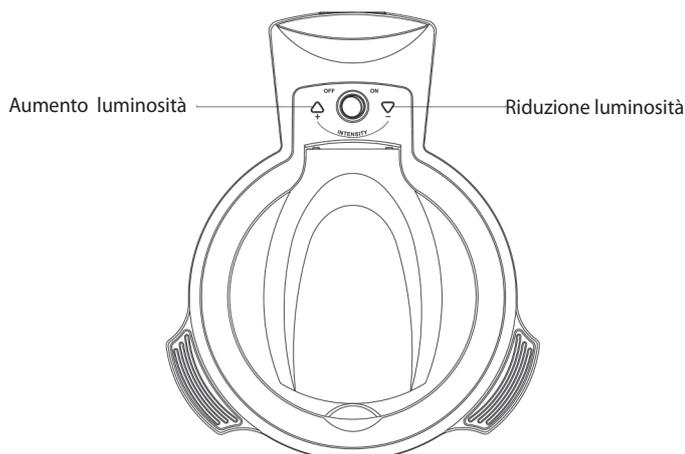


5. Lente di ingrandimento:

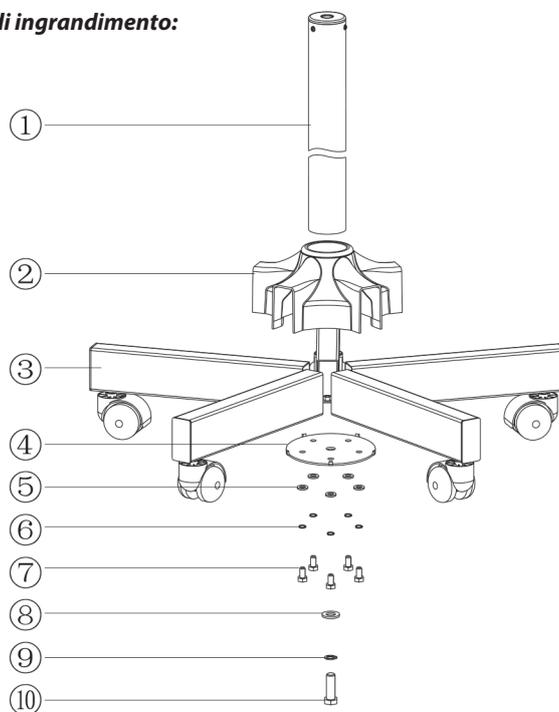

Componenti per l'installazione:

N.	Nome	Qta.
1	Colonna	1
2	Supporto pentagonale della base	1
3	Base con cinque piedi	5
4	Piastra di fissaggio del supporto pentagonale	1
5	Cuscinetto piatto n. 6	5

N.	Nome	Qta.
6	Cuscinetto a molla n. 6	5
7	Vite esagonale M6X20	5
8	Cuscinetto a molla n. 10	1
9	Cuscinetto piatto n. 10	1
10	Vite esagonale M10X40	

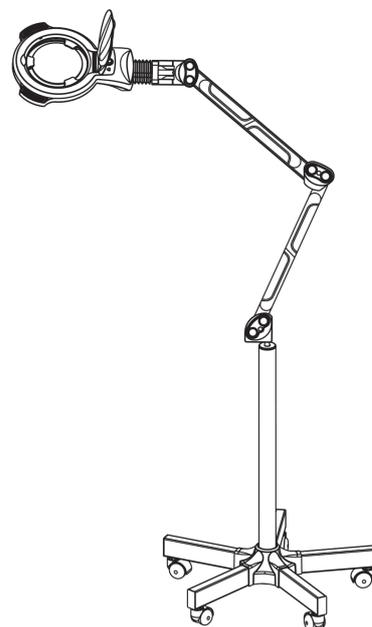

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Fabbricante **SILVERFOX CORPORATION LIMITED**
 No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,
 JiangMen City, GuangDong Province, China
 amy.liang@silverfox.cn
 Made in China

GIMA 30736

REF 1006A

Importato da:

Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

