

# LUXIFLEX LED PLUS

**MIMSAL**

**MIMSAL TRADE S.L.**

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain  
Tel. +34 930 139 860 - [mimsal@mimsal.com](mailto:mimsal@mimsal.com) - [www.mimsal.com](http://www.mimsal.com)



ver. 1

**MIMSAL**

Lampada molto versatile, di design, destinata a riconoscimento ed esame, a elevate prestazioni, ideale per centri di trattamento medico e anche veterinario.

La distanza di lavoro ottimale tra la sorgente luminosa e l'oggetto illuminato è di 50 cm.

### 1. Installazione

- Necessita di supporto MIMSAL, da installare prima della collocazione della lampada.
- Si fornisce un supporto a morsetto da tavolo AH e, come accessori opzionali, eventualmente anche supporti da parete, soffitto o una base girevole.
- MIMSAL non può garantire la durata e la funzionalità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

### 2. Precauzioni

- Scollegare la lampada dall'alimentazione elettrica ogniqualvolta si realizzano operazioni di pulizia o manutenzione.
- Pulire la lampada a secco o utilizzando una miscela delicata di acqua e sapone normale. Evitare l'utilizzo di alcol, acidi o qualsiasi tipo di solventi organici.
- Non lasciare la lampada accesa per oltre 8 ore consecutive.

### 3. Risoluzione dei problemi e manutenzione

- Deve essere realizzata esclusivamente da installatori qualificati o altro personale qualificato.

In caso di qualsiasi altro problema, contattare il rappresentante locale MIMSAL..

MIMSAL è responsabile unicamente della manutenzione, riparazione o sostituzioni realizzate utilizzando parti di ricambio originali e attraverso personale MIMSAL.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso.

	<b>LUXIFLEX LED PLUS</b>
Sorgente luminosa	LED 10W
Durata	> 50.000 h
Luce a 50 cm	35.000 lux
Temperatura di colore	4.500° K
Resa cromatica	97%
Classe di protezione elettrica	Classe II
Lunghezza del braccio	72 cm
Colore	Bianco
Potenza	110/230V
Frequenza	50/60 Hz