



Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd 江苏苏云医疗器材有限公司

Add: No.1, Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
地址: 中国江苏省连云港市人民路制药巷1号 (222002)

SET OTORINOLARINGOIATRICO STERILE MONOUSO

Componenti

1pc speculum nasale, 2pcs speculum auricolari (adulto e pediatrico), 1pc abbassalingua in plastica, e 1pc pinzetta e 6pcs applicatore con punta in cotone, 2pcs specchietti laringei e 1pc salvietta.

Utilizzo del prodotto

Il prodotto è indicato nell'esame clinico ORL da parte di personale specializzato, lo speculum nasale a supporto dell'esame del naso, lo speculum auricolare per esaminare l'orecchio interno, abbassalingua e specchietto faringei sono utili per esame di bocca e gola. L'applicatore con punta di cotone può essere utilizzato per il campionamento e la pulizia. Prima dell'utilizzo, controllare che il pacco sia integro e che sia mantenuta la sterilità del contenuto, quindi esaminare che tutti i componenti siano nella piastra; provvedere a fissare la salvietta al paziente, per evitare ogni possibile contaminazione.

Attenzione

Non usare se il pacchetto è rotto. Prodotto monouso, non riutilizzare. Operare con la dovuta attenzione al fine di mantenere il paziente indenne da lesioni o ferite o da rottura accidentale durante l'utilizzo.

Conservazione

I prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco, asciutto e pulito.

Data di scadenza

5 anni dalla data di sterilizzazione.

Indice dei simboli

	Codice prodotto		Numero di lotto		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Fabbricante		Data di scadenza		Non ri-sterilizzare
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Sterilizzato con ossido di etilene		Data di fabbricazione		