



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PRESSAN®

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



ITALIANO


Il PRESSAN® è un pratico accessorio per l'igiene dello sfigmomanometro durante la misurazione della pressione arteriosa sanguigna; è realizzato in tessuto non tessuto bianco, per garantire al paziente comfort e igiene.

Come illustrato in **Fig. 1**, prima di procedere alla misurazione, PRESSAN® viene infilato attraverso la mano del soggetto in direzione della freccia F e posizionato sull'avambraccio; a questo punto si procede alla misurazione della pressione applicando il manicotto dello sfigmomanometro sopra il PRESSAN® (**Fig. 2**).

Al termine della rilevazione, PRESSAN® viene sfilato dal braccio e gettato.

Il suo utilizzo non modifica in alcun modo i valori pressori del paziente; la sua abituale sostituzione ad ogni rilevazione pressoria garantisce una buona igiene sia dello sfigmomanometro che del braccio del paziente.

È un supporto leggero, ripiegabile, di piccole dimensioni, utilizzabile in un ambulatorio medico ed in ospedale e farmacia ma anche riposto nella borsa dell'operatore sanitario per effettuare le rilevazioni pressorie a domicilio.

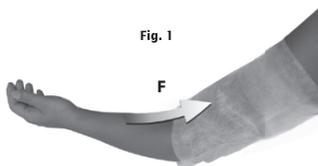

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante
LEVETTA s.a.s. di Maffei Michele & C.
Via dei Cancellieri, 6/8
51100 Pistoia (Italy)
Made in Italy

REF 5208 (GIMA 32858)