

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE IMMOBILISATION BELTS

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Questo prodotto viene utilizzato con la barella per il trasporto dei pazienti in contesti emergenziali.

Ha la funzione di fissaggio.

La cinghia è prodotta in polipropilene.

Il materiale della fibbia è POM.

La lunghezza della cinghia è regolabile e l'attacco può essere velocemente rimosso.

La capacità di carico dell'intero prodotto è >60kg

FUNZIONAMENTO

Sganciare la cinghia di sicurezza e fissare il paziente sulla barella, quindi stringere la fibbia, regolare la lunghezza della fascia in maniera tale che il paziente risulti bloccato in modo sicuro.

AVVERTENZA

Durante il trasporto, prestare attenzione a eventuali danneggiamenti della cinghia fissa a causa dell'andatura irregolare. Se la cinghia viene allentata, regolarla per stringerla come opportuno.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Dopo ogni utilizzo, utilizzare acqua corrente o un detergente neutro per pulire lo sporco dalla superficie. Una volta asciugata, conservare per utilizzi successivi. Se vi sono macchine di sangue o liquidi corporei residui, disinfettare il prodotto con un apposito disinfettante, quindi ripulire.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto
	Data di fabbricazione

 34010 - 34011

 Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

 

