



SEDIA PORTANTINA cod.SED001

Istruzioni d'uso e manutenzione



Fig1



Fig2

APERTURA

Per aprire partendo dalla sedia piegata , fig 1 ,afferrare con le mani i punti A e B spingere a fondo sino a portare la sedia come in fig. 2

APPONTAMENTO PER IL TRASPORTO DEL PAZIENTE

Una volta che il paziente è sulla sedia si possono abbassare i braccioli facendo pressione sulla parte terminale superiore della protezione in plastica, fig 3. Per portare in posizione orizzontale le maniglie di sollevamento posteriori alzarle verso l'alto. Per abbassare le maniglia di sollevamento anteriore premere sino a sentire lo scatto dell'aggancio fig 4 . Si possono allungare le barre di sollevamento anteriori premendo il pulsante e tirando la maniglia verso di se. Al termine la sedia si troverà come in fig. 2



Fig3




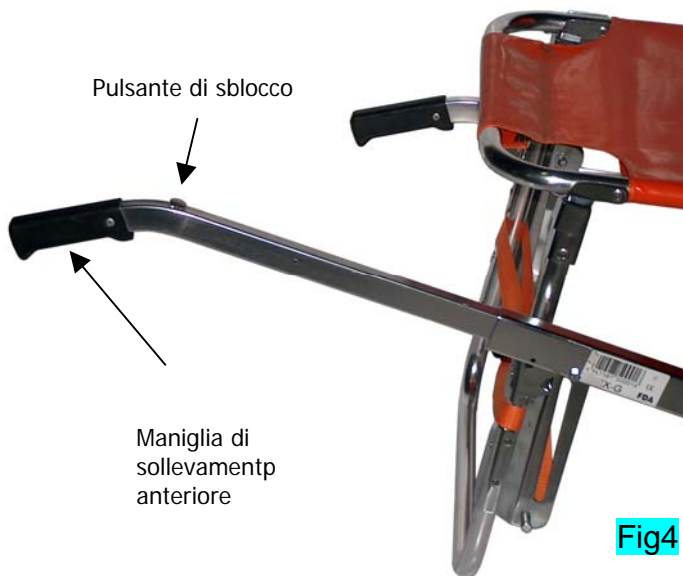


Fig4

SISTEMI DI SICUREZZA

Per dare maggiore stabilità alla sedia aperta è possibile bloccare la ruota sinistra , fig 5 , premendo con il piede nel punto A . Per sbloccare premere nuovamente con il piede nel punto B. Per riportare alla posizione di partenza la maniglia di sollevamento anteriore , afferrare con la mano il sistema di sgancio in fig. 6 , tirarlo verso di se, sino a liberare il perno , quindi sollevare la maniglia. La sedia è dotata di cinture con aggancio rapido per imbracare il paziente.

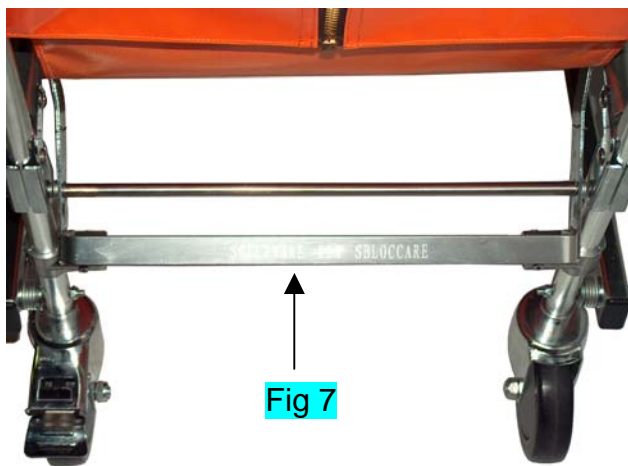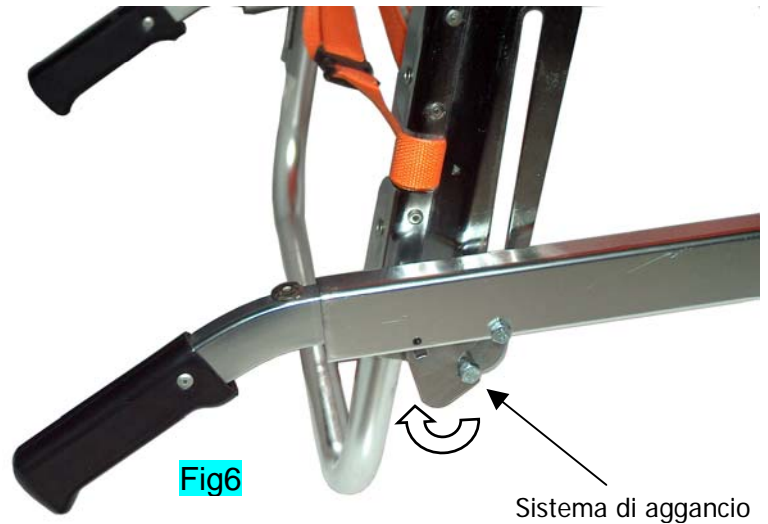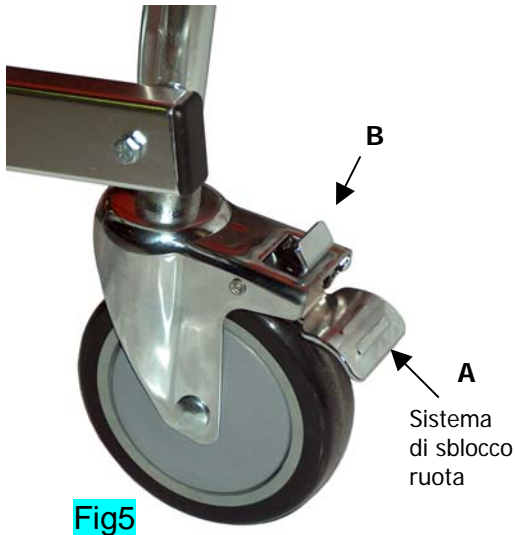

CHIUSURA DELLA SEDIA

Riportare le varie maniglie in posizione di partenza . Sollevare con una mano la barra di fig 7 , con l'altra il profilo in alluminio del sedile e tirarlo per chiudere la sedia . Completare la chiusura sino a riportare la sedia come in fig. 1. Per maggiore sicurezza la sedia è dotata di cinture per evitarne l'apertura accidentale

PULIZIA E STOCCAGGIO

Pulire utilizzando liquidi disinfettanti per strumentario : Dispositivi Medici. Conservare in luogo asciutto lontano dalla polvere o da fonti di calore dirette.

Dati dimensionali:

chiusa : mm.910H x 195P x 520L
aperta : mm.910H x 710P x 520L
peso : 8,50 Kg.
portata: 150 Kg.