

# BARELLA MULTIPOSIZIONE AUTOMATICA

## FULL AUTOMATIC MULTIPOSITION STRETCHER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### I. Caratteristiche tecniche:

1. Dimensioni prodotto (LxWxH):  
Posizione alta: 198x54x94 cm  
Posizione bassa: 198x54x35 cm
2. Dimensioni imballaggio (1 pz): 200x60x35 cm
3. Peso Netto: 39 kg - Peso Lordo: 45 kg
4. Angolo massimo del Bach: 85°
5. Capacità di carico: 159 kg

### II. Modalità di utilizzo:

Questa barella con carrello può essere utilizzata da una sola persona che la spinga all'interno dell'ambulanza: è completamente automatica, quindi non occorre premere alcun bottone, è sufficiente spingere abbastanza: l'altezza può essere regolata a seconda delle necessità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l'ascensore di un ospedale, un'ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatta in alluminio; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza e facile da sterilizzare e pulire.

### III. Applicazioni:

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

### IV. Attenzione:









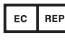


1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

### V. Manutenzione:

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.


### VI. Conservazione e trasporto:


1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
3. È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istruzioni riportate sull'imballo.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 TD010131G (Gima34072)

 Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd  
No.999 Hongqi Road, Changyinsha  
Modern Agricultural Demonstration Area,  
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China  
Made in China

 SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherland

Importato da / Imported by:  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

