



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CON RUOTE WHEEL STRETCHER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Parametri tecnici

1. Dimensioni prodotto (L x W x H): 188 x 53 x 21 cm
2. Dimensioni prodotto piegato (L x W x H): 92 x 50 x 11 cm
3. Dimensioni imballaggio (1 pz): 96 x 54 x 21 cm (2pz / cartone)
4. Peso Netto: 8 kg Peso Lordo: 9 kg
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo

Questa barella pieghevole per il primo soccorso, divisibile, è utilizzata principalmente per trasportare pazienti con fratture. Entrambe le estremità della barella hanno cerniere che permettono di separarla in una parte destra e una sinistra. Questo permette di adagiare rapidamente e delicatamente il paziente sulla barella, sul tavolo operatorio o sul letto.

III. Applicazioni

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione

1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.

VII. Imballaggio

1. Imballato in cartone ad alta resistenza con base in legno.
2. Certificato di ispezione, manuale d'uso e distinta della merce inclusi nell'imballo.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Identificatore univoco dispositivo
	Importato da				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA 34077



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

REF

TD010112

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

