



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAVOLA SPINALE VALU VALUE SPINAL BOARD

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Caratteristiche tecniche:

1. Dimensioni del prodotto (L x L x A): 183 x 43 x 7 cm
2. Dimensioni dell'imballaggio: 186 x 47 x 7 cm
3. Peso netto: 8 kg - Peso lordo: 9kg
4. Portata: inferiore a 159 kg

II. Modo d'uso:

L'asse spinale è usata per il trasporto di pazienti con fratture. Asse in polietilene ad alta densità per un prodotto leggero, robusto ed economico. Ciò permette di posizionare il paziente in modo rapido e delicato sulla barella, sul tavolo operatorio o sul letto. La barella viene quindi tolta da sotto al paziente.

III. Applicazioni:

Approvato per l'uso clinico, questo prodotto è adatto per essere utilizzato su ambulanze e in campi di battaglia, ospedali, palestre, per trasportare feriti e pazienti. Può anche essere usata per operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Quando si trasportano i pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente il dispositivo di blocco nella parte anteriore e di allacciare la cinghia, per garantire la sicurezza dei pazienti.
2. Durante l'uso generico, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere sempre pulita (procedere alla regolare sterilizzazione).
2. Controllare spesso che non vi siano parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:

1. Conservare questo prodotto lontano dall'umidità, per preservarlo dalla corrosione.
2. Questo prodotto può essere trasportato con un comune mezzo di trasporto.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF TD010162A (Gima 34092)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherland

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

