

QUICK SPLINT

SET

REF PNE244



I ISTRUZIONI PER L'USO

GB INSTRUCTIONS

F MODE DE EMPLOI

E MODO DE EMPLEO

P INSTRUÇÕES

 PVS SPA VIA LEONARDO DA VINCI 18 20051 CASSINA DE PECCHI (MI) ITALY

2021-7-30(A/1)
EU Regulation 2017/745(MDR)





INDICAZIONI : I sistemi QUICK SPLINT servono per il bloccaggio rapido degli arti in caso di fratture ossee, contusioni e distorsioni. Il sistema è particolarmente indicato per limitare gli effetti dolorosi causati dalle sollecitazioni dovute al trasporto del paziente in quanto il supporto crea un cuscino d'aria attorno all'arto infortunato. Inoltre la pressione esercitata sull'arto permette di evitare il bendaggio in caso di ferite aperte . I materiali utilizzati inoltre consentono di effettuare esami radiografici senza rimuovere il sistema di bloccaggio.

DESCRIZIONE : I sistemi QUICK SPLINT sono costituiti da un involucro gonfiabile in PVC che si applica agli arti da immobilizzare tramite una cerniera sempre in PVC e da una pompa per insufflare aria nell'involucro. La serie QUICK SPLINT è composta da 4 modelli oltre alla pompa :


1 - Gamba intera

2 - Caviglia- piede

3 - Braccio intero

4 - Avambraccio-mano

5 - Pompa

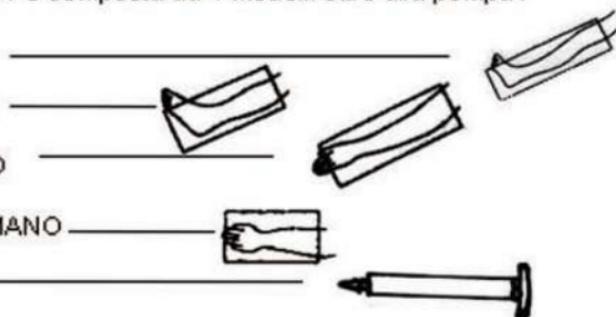

MODALITA D'USO : per bloccare fare scivolare l'involucro sotto l'arto infortunato, avvolgere e chiudere la cerniera . Insufflare aria tramite l'apposita pompa . Per liberare aprire la cerniera , far defluire l'aria dall'involucro premendo la base della valvola e l'involucro stesso quindi sfilare dall'arto.



ATTENZIONE : l'operazione deve essere eseguita da personale esperto. Interrompere l'uso se si riscontrano danni ai materiali o perdite d'aria.

PULIZIA : dopo aver utilizzato il sistema di bloccaggio pneumatico occorre pulirlo accuratamente con acqua e sapone. Si può disinfettare con liquido battericida preferibilmente fabbricato in accordo con il Nuovo MDR 745/2017.

CONSERVAZIONE : conservare in luogo asciutto al riparo dalla polvere e dal calore.

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi relativamente al DM fornito da PVS SPA al Fabbricante e all'autorità competenti