

SET STECCOBENDE RIGIDE SPLINT KIT with waterproof bag

ITALIANO

1. USO PREVISTO DEL PRODOTTO

Fissaggio temporanea degli arti umani dopo una lesione.

2. PROCEDURA DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: Aprire la sacca portatile ed estrarre il prodotto come raffigurato. (Figura 1)

Fase 2: Aprire il prodotto. (Figura 2)

Fase 3: Posizionare con cura il prodotto sotto all'arto da immobilizzare. (Figura 3)

Fase 4: Una volta fissato il prodotto, il paziente può essere spostato in modo che possa ricevere le cure necessarie. (Figura 4)



3. MANUTENZIONE

3.1 Pulire con un panno pulito e disinfettare con un disinfettante. Risciacquare con acqua calda e lasciare asciugare naturalmente all'aria. Pulire la superficie con un panno pulito.

3.2 Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra -20 e 60 °C e in un ambiente asciutto e aerato, al riparo da gas corrosivi e pioggia.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto
	Data di fabbricazione
	Limite temperatura

REF 34119


Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

