

REF - 34227 VALVOLA PEEP
- 34228 ADATTATORE VALVOLA PEEP



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Descrizione del Prodotto:

La valvola PEEP è un accessorio pensato per creare una pressione polmonare positiva con il fine d'espiazione e per essere utilizzata con rianimatori manuali.

Specifiche:

1. Intervallo di regolazione: 2-10 cmH₂O e 5-20 cmH₂O (+/- 2 cm H₂O) Regolazione della capacità di flusso 3LPM
2. Adattatore: 3 mm, 22/15 mm Dimensioni esterne 22 mm e 30 mm
3. Peso: 160 g (senza maschera)

Funzionamento:

1. Applicare la valvola deviatrice alla valvola del paziente, come illustrato nel disegno.
2. Ruotare la valvola deviatrice in direzione opposta al paziente o verso il personale di emergenza.
3. Dopo l'assemblaggio, comprimere il rianimatore alcune volte, per assicurarsi che funzioni correttamente.
4. Scegliere la valvola PEEP appropriata che rientri nelle specifiche sopra riportate. (2-10 cm H₂O o 5-20 cm HO).
5. Ruotare la manopola della valvola PEEP fino ad ottenere la pressione necessaria, indicata sulla base della valvola.
6. Come illustrato nel disegno, applicare la valvola PEEP alla valvola deviatrice, collegare la valvola del rianimatore del paziente al manometro e al pallone respiratorio, premere sul rianimatore per favorire lo scambio d'aria all'interno del pallone respiratorio e regolare la valvola PEEP in modo da ottenere la pressione richiesta.

Attenzione:

- La legge federale limita la vendita del presente dispositivo da parte o per ordine di un medico.
- Questo prodotto deve essere utilizzato da personale esperto.

Conservazione:

- Temperatura di conservazione e di trasporto: da -20°C to +60°C (-4°F to 140°F)
- Conservare il dispositivo in un ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Pulizia:

1. Smontare la valvola PEEP in tre parti come sopra illustrato. (Non smontare la molla della valvola, poiché potrebbe danneggiarsi).
2. Lavare accuratamente i tre componenti con acqua calda contenente un detergente delicato.

Assicurarsi che il detergente sia compatibile con il materiale dei componenti da lavare, per evitare possibili danni.

3. Risciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua calda, in modo da rimuovere completamente il detergente.

Sterilizzazione:

1. Sterilizzazione in autoclave, max (120°C/248°F)
2. Ossido di etilene
3. Comune soluzione disinfettante utilizzata per le apparecchiature che entrano in contatto con il paziente. Risciacquare accuratamente dopo questo tipo di sterilizzazione.

Ispezione visiva del gruppo di assemblaggio:

1. Al termine della sterilizzazione, attendere che tutti i componenti siano asciutti.
2. Ispezionare tutti i componenti, per accertarsi che non siano usurati o danneggiati. Sostituirli, se necessario.
3. Una volta assemblata la valvola PEEP, sigillare il palloncino e registrare i dati della sterilizzazione sul palloncino.

Testare la valvola PEEP, procedendo nel modo seguente:

Collegare la valvola PEEP al rianimatore, utilizzando la valvola deviatrice del flusso, come illustrato nelle istruzioni per l'uso. Collegare il rianimatore ad un manometro e al polmone di prova. Ventilare il polmone di prova, per assicurarsi che la valvola PEEP funzioni correttamente.

Simboli - Symbols

	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE Medical Device complies with Directive 93/42/EEC
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully
	Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Data di fabbricazione Date of manufacture
	Data di scadenza Expiration date
	Codice prodotto Product code
	Fabbricante Manufacturer
	Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Numero di lotto Lot number

