



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## RESERVOIR MONOUSO OXYGEN RESERVOIR

ITALIANO

### Modello

REF 34257 Reservoir monouso con valvola - 1000ml

REF 34258 Reservoir monouso con valvola - 2500ml

REF 34275 Sacca ossigeno Reservoir - 2500ml

### Accessori

REF 34279 Valvola per Reservoir

### Descrizione prodotto

Il dispositivo è stato progettato per l'uso in un circuito respiratorio, per controllare, monitorare la ventilazione di un paziente. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di personale medico qualificato).

### Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso controllare visivamente il passaggio del flusso d'aria.
2. Collegare la sacca al sistema circuito respiratorio
3. Controllare che il collegamento sia compatibile.

### Avvertenze

1. Il prodotto deve essere sistemato in un luogo asciutto e pulito mantenendolo sigillato.
2. L'operatore deve conoscere ed essere formato a praticare la rianimazione CPR.

### Precauzioni

- Prodotto monouso.
- Il paziente deve essere monitorato scrupolosamente quando viene utilizzato questo dispositivo.
- Questo prodotto è stato confezionato in un ambiente igienicamente controllato.
- Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce.

Simboli					
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Codice prodotto		Data di scadenza
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Numero di lotto		

**REF**

**34257 - 34258 - 34275 - 34279**



**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

**[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**

Made in China



**0476**

