

ISTRUZIONI D'USO

CANNULE DI GUEDEL

REF 34431 Cannula di Guedel 40mm

REF 34432 Cannula di Guedel 50mm

REF 34433 Cannula di Guedel 60mm

REF 34434 Cannula di Guedel 70mm

REF 34435 Cannula di Guedel 80mm

REF 34436 Cannula di Guedel 90mm

REF 34437 Cannula di Guedel 100mm

REF 34438 Cannula di Guedel 110mm

REF 34383 Cannula di Guedel 120mm

REF 34439 Assortimento Cannule di Guedel (1pz REF 34431 + 1pz REF 34432 + 1pz REF 34433 + 2pz REF 34434 + 2pz REF 34435 + 1pz REF 34436 + 1pz REF 34437 + 1pz REF 34438)

*MONOPAZIENTE * MONOUSO



STERILE EO

Istruzioni d'uso:

1. Scegliere la misura corretta (determinata dalla distanza tra l'angolo della bocca e il trago).
2. Lubrificare e inserire con la curvatura inizialmente posta all'insù, e poi rotata per metà in modo da seguire la curvatura della lingua.
3. In pazienti con edentulia, può essere inserita già all'inizio con la sua curvatura che segue quella della lingua.
4. Una volta inserita, è molto importante sostenere la mascella per mantenere le vie respiratorie libere.

Attenzione:

- **Gli operatori specializzati devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**

Temperatura di stoccaggio e trasporto: da -20°C a +60°C.

LOT



GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia - www.gimaitaly.com

MADE IN TAIWAN

CE 0476