

ISTRUZIONI PER L'USO

BENDE ADESIVE NON STERILI

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO: PAP02NBSC

FABBRICANTE: RAYS S.p.A. – Via Francesco Crispi 26 – 60027 – Osimo (AN)

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

INDICAZIONE MONOUSO: Dispositivo medico monouso

DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivo medico per medicazioni.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Lavare accuratamente le mani

Aprire la confezione.

Adattare la parte adesiva alla pelle pulita e asciutta.

Rinnovare la medicazione all'occorrenza..

Non applicare direttamente sulla cute lesa.

In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

LATEX FREE:

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it