

# ***ISTRUZIONI PER L'USO***

## ***BENDE ADESIVE STERILI***

### **DESTINAZIONE D'USO:**

Dispositivo medico per medicazioni.

### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

Lavare accuratamente le mani

Aprire la confezione e rimuovere la carta protettiva.

Centrare la compressa assorbente sulla ferita, evitando di toccarla, adattare la parte adesiva alla pelle pulita e asciutta.

Rinnovare la medicazione all'occorrenza..

In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

### **LATEX FREE:**

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

### **METODO DI STERILIZZAZIONE:**

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

### **SMALTIMENTO:**

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

### **CONSERVAZIONE:**

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

*Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.*



**Health&Safety**

**RAYS SPA**

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - [www.rays.it](http://www.rays.it) - [info@rays.it](mailto:info@rays.it)