



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE ROLLING STAND

REF 8030421049 (Gima 35148)

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China



Istruzioni per l'Utente

Si prega di leggere attentamente le istruzioni del supporto a rotelle prima dell'uso per assicurarne il corretto e ideale funzionamento. Il presente manuale descrive le operazioni di installazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto e lo stoccaggio. Conservare questo manuale per consultazione futura.



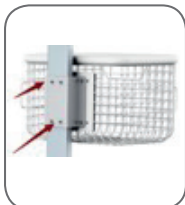
1 Caratteristiche



Rotelle silenziose
con freni



Cesto con manico
e gancio



Sedi di Installazione
del Cesto



Altezza regolabile



Fermo della piastra
di montaggio

2 Utilizzo designato

Questo prodotto è progettato per il trasporto di dispositivi come i Monitor paziente, Monitor ECG, ecc., e per rendere più facile ed efficiente il lavoro del personale sanitario.

3 Fotografie



4 Pulizia e Disinfezione

1. Rimuovere il monitor prima di effettuare la pulizia del supporto a rotelle.
2. Si consiglia di pulire periodicamente il supporto. Utilizzare esclusivamente detergenti non corrosivi. Diluire i prodotti detergenti seguendo le istruzioni del produttore.
3. Pulire la superficie del supporto con un panno imbevuto di alcool o detergente, quindi asciugare con un panno asciutto o lasciare asciugare all'aria.

5 Dimensioni e peso:

Dimensioni: 503*461*H 1050 mm

Peso (imballaggio compreso): 10 KG

Dimensioni dell'imballaggio: 780*470*H 185 mm

6 Trasporto e stoccaggio:

1. Trasporto

Trasportare o spostare il supporto a rotelle all'interno del suo imballaggio originale, mantenere asciutto ed evitare urti e buche.

2. Condizioni di stoccaggio:

Conservare il supporto a rotelle in un ambiente asciutto e ben ventilato, privo di polvere e di gas corrosivi.

Quando il supporto è all'interno nel suo imballaggio originale, non appoggiarvi sopra altri prodotti oltre quattro strati. La stanza di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente.

7 Elenco d'imballaggio

Kit di base *1 Piastra di montaggio *1 Asta di supporto *1

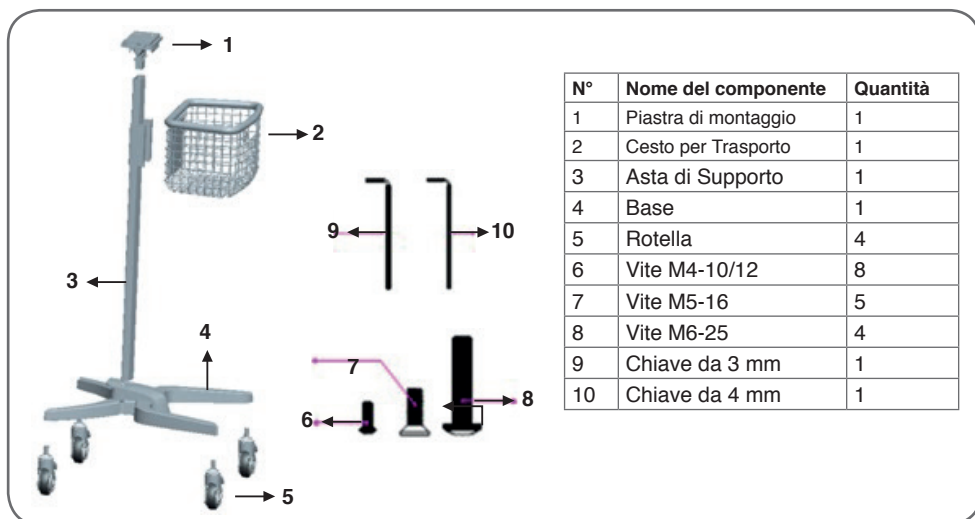
Rotella *4 Utensile per l'installazione *1

8 Risoluzione dei problemi

| Problema | Analisi | Soluzione |
|--|---|--|
| L'asta di supporto vibra | Le viti di fissaggio alla base potrebbero essere allentate | Controllare le viti e stringerle se necessario |
| L'altezza del supporto non può essere regolata | Le viti di regolazione sul manico sono troppo strette / allentate | Effettuarne la regolazione come desiderato |

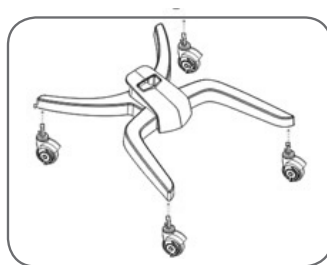
9 Installazione

Elenco dei componenti

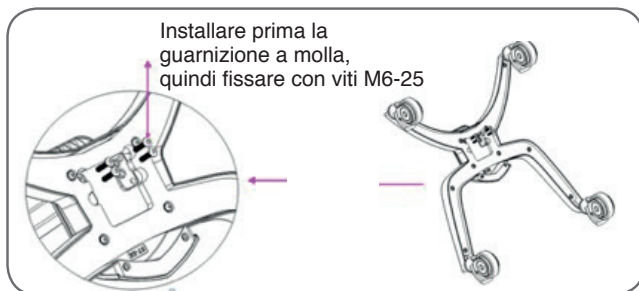


Fase 1:

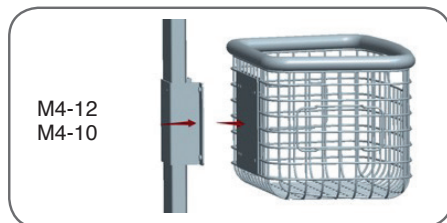
Fissare le rotelle nelle relative sedi sulla base.

**Fase 2:**

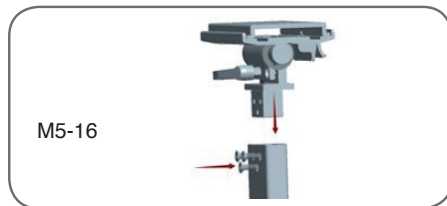
Inserire l'asta di supporto nella base e fissarla con viti M6-25.

**Fase 3:**

Installare il cesto di trasporto e fissarlo con viti M4-10 e M4-12 seguendo le immagini seguenti

**Fase 4:**

Inserire la piastra di montaggio nell'asta di supporto e fissarlo con viti M5-16.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.