



ISTRUZIONI PER L'USO

NOME DEL PRODOTTO: STRISCE INDICATRICI DI VAPORE A VARIABILE MULTIPLA TIPO 4 (IS2401)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Le strisce indicatrici di vapore a variabile multipla tipo 4 PMS Steritest sono progettate per l'uso in autoclavi pre-vuoto, con temperatura d'esercizio di 134 °C o 121 °C.

Dopo l'esposizione all'autoclavaggio, l'indicatore chimico fornisce una conferma visiva accurata cambiando colore, ad indicare che le condizioni di sterilizzazione sono state soddisfatte.

Le strisce indicatrici di vapore a variabile multipla tipo 4 PMS Steritest sono classificate come Tipo 4 in conformità alla norma EN ISO 11140-1.

Durante l'esposizione alla sterilizzazione a vapore a 134 °C o 121 °C, il colore dell'indicatore cambierà da **Blu** a **Grigio/Nero**.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Collocare una striscia indicatrice chimica PMS Steritest, aprire l'astuccio o il vassoio da autoclavare. Collocare la striscia in una posizione della confezione dove il vapore arriva con difficoltà.
- Sottoporre la confezione al normale processo di autoclavaggio.
- Al termine del ciclo di sterilizzazione, verificare che l'indicatore abbia cambiato colore e sia diventato grigio/nero.
- Se il cambiamento di colore non è visibile o non è uniforme, le condizioni di sterilizzazione possono essere inadeguate e gli articoli devono essere nuovamente sottoposti alla procedura con strisce indicatrici nuove/non processate.
- I prodotti conservati alle condizioni raccomandate hanno una vita utile di tre (3) anni dalla data di produzione.
- La data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto sono stampate sulla scatola del prodotto.
- Le strisce indicatrici chimiche non devono essere riutilizzate.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare a una temperatura massima di 35 °C e con una umidità massima del 70% UR.
- Le strisce indicatrici chimiche devono essere tenute lontane da fonti di calore dirette, dalla luce del sole e da umidità in eccesso.



PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi12. Cad. N.2
Huzurkent/Mersin/TURCHIA
Telefono: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549
pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com