



ISTRUZIONI PER L'USO

NOME DEL PRODOTTO: STRISCE INDICATRICI DI EMULAZIONE DEL VAPORE TIPO 6 (IS2601)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Le strisce indicatrici di emulazione del vapore tipo 6 PMS Steritest sono progettate per l'uso in autoclavi pre-vuoto come indicatrici di verifica del ciclo, a condizioni d'esercizio di 134 °C – 3,5 min. o 121 °C – 15 min.

Dopo l'esposizione all'autoclavaggio, l'indicatore chimico fornirà una conferma visiva accurata tramite il cambiamento di colore, ad indicare la presenza o l'assenza dei parametri specifici di temperatura e di tempo durante il ciclo di autoclavaggio.

Le strisce indicatrici di emulazione del vapore tipo 6 PMS Steritest sono classificate come Tipo 6 in conformità alla norma EN ISO 11140-1.


Durante l'esposizione all'autoclavaggio a 134 °C o 121 °C, il colore dell'indicatore cambierà da **Blu a Lilla**.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Collocare una striscia indicatrice chimica PMS Steritest, aprire l'astuccio o il vassoio da autoclavare. Collocare la striscia in una posizione della confezione dove il vapore arriva con difficoltà.
- Sottoporre la confezione al normale processo di autoclavaggio.
- Al completamento del ciclo di autoclavaggio, verificare che l'indicatore abbia cambiato colore e sia diventato lilla.
- Se il cambiamento di colore non è visibile o non è uniforme, le condizioni di sterilizzazione possono essere inadeguate e gli articoli devono essere nuovamente sottoposti alla procedura con strisce indicatrici nuove/non processate.
- I prodotti conservati alle condizioni raccomandate hanno una vita utile di tre (3) anni dalla data di produzione.
- La data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto sono stampate sulla scatola del prodotto.
- Le strisce indicatrici chimiche non devono essere riutilizzate.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare a una temperatura massima di 35 °C e con una umidità massima del 70% UR.
- Le strisce indicatrici chimiche devono essere tenute lontane da fonti di calore dirette, dalla luce del sole e da umidità in eccesso.

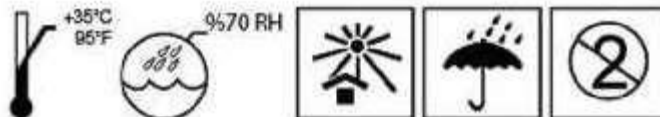

PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. N.2
Huzurkent/Mersin/TURCHIA

Telefono: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549
pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com