

Spazzola / spugna, per pulizia mani con pulisci unghie, sterile

CORE-SCRUB "D" (ref. CS-270-D)



(dispenser da 30 pz. - unità di vendita Box da 270 pezzi)

(IT) ISTRUZIONI D' USO

- Lavaggio pre-operatorio per mani con cute integra
- Spazzola/spugna con pulisci unghie, monouso
- Aprire la confezione dal lato "OPEN"
- Inumidire mani, avambraccia e spugna con l'acqua, in caso di impiego di spugna/spazzola a secco utilizzare sapone antisettico
- Risciacquare abbondantemente mani e avambracci con acqua corrente
- Buttare dopo l'uso
- Esclusivamente per uso esterno, pre-operatorio
- evitare il contatto con gli occhi - non ingerire.
- In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente e, se necessario, consultare un medico