

**Art. CS-270-C CORE-SCRUB C**

<b>Codice Articolo</b>	CS-270-C
<b>Misura</b>	===
<b>N°. Repertorio</b>	N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC : Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010
<b>Codice CND</b>	N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC : Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010

**Descrizione**

Spazzolino flessibile monouso con stilo netta unghie e con spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante

**Indicazioni**

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie.

**Avvertenze**

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se necessario, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire **NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.**


**Stoccaggio**

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

**Modo d'uso**

- Aprire la confezione dal lato "APRIRE".
- Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie cutanea umida.
- Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti.
- Risciacquare abbondantemente mani e avambracci con acqua corrente.
- Gettare la spazzola dopo l'uso e smaltire secondo le disposizioni legislative in vigore.

Spazzolino flessibile con spugna

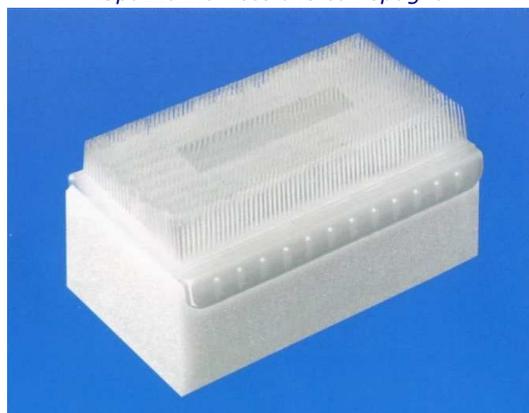

Etichetta della singola confezione



**Caratteristiche Tecniche**

<b>Materiale Impiegato</b>	SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata SPUGNA in poliuretano PULISCI UNGHIE in pvc
<b>Confezionamento</b>	Singolo pezzo in involucro termosaldato
<b>Dimensione solo spazzola</b>	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 8 – 15
<b>Dimensione solo spugna</b>	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 25
<b>Dimensione complessiva Spazzola e spugna</b>	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 40
<b>Dimensione pulisci unghie</b>	Lunghezza mm 60 Larghezza mm 10 Altezza mm 2
<b>Composizione per 100 g. di soluzione</b>	Gluconato di Clorexidina (20%) 4 g. (puro 0,8 g.) Acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 g.
<b>Unità di vendita</b>	9 box dispenser da 30 pz o box dispenser da 100 unità
<b>Scadenza</b>	Prodotto con validità 2 anni (24 mesi)
<b>Presidio Medico Chirurgico</b>	Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010



**LATEX FREE**

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto. La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

**COREMEC s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)