

Art. CS-270-C CORE-SCRUB C

Codice Articolo	CS-270-C
Misura	===
N°. Repertorio	N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC : Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010
Codice CND	N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC : Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010

Descrizione

Spazzolino flessibile monouso con stilo netta unghie e con spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante

Indicazioni

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie.

Avvertenze

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se necessario, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire **NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.**


Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

Modo d'uso

- Aprire la confezione dal lato "APRIRE".
- Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie cutanea umida.
- Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti.
- Risciacquare abbondantemente mani e avambracci con acqua corrente.
- Gettare la spazzola dopo l'uso e smaltire secondo le disposizioni legislative in vigore.

Spazzolino flessibile con spugna

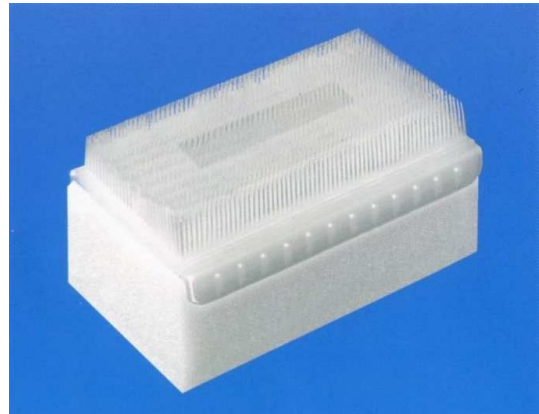


Etichetta della singola confezione



Caratteristiche Tecniche

Materiale Impiegato	SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata SPUGNA in poliuretano PULISCI UNGHIE in pvc
Confezionamento	Singolo pezzo in involucro termosaldato
Dimensione solo spazzola	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 8 – 15
Dimensione solo spugna	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 25
Dimensione complessiva Spazzola e spugna	Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 40
Dimensione pulisci unghie	Lunghezza mm 60 Larghezza mm 10 Altezza mm 2
Composizione per 100 g. di soluzione	Gluconato di Clorexidina (20%) 4 g. (puro 0,8 g.) Acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 g.
Unità di vendita	9 box dispenser da 30 pz o box dispenser da 100 unità
Scadenza	Prodotto con validità 2 anni (24 mesi)
Presidio Medico Chirurgico	Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010

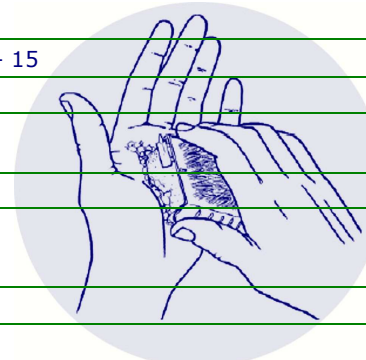

LATEX FREE

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto. La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it