

Disinfettante concentrato
per dispositivi medici non invasivi
ad azione detergente

PERICOLO**Proprietà**

GERMOCID INODORE è una soluzione concentrata che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante. E' attivo contro i batteri Gram positivi e Gram negativi, funghi, micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE è un prodotto specifico per la pulizia e la disinfezione di superfici e dispositivi medici non invasivi come maschere facciali, riuniti odontoiatrici e per il trattamento di varie attrezzature/oggetti come scrivanie, braccioli, maniglie di studi medici e dentistici. L'elevata efficacia e rapidità, sia come detergente che come disinfettante in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici), gli consente di essere utilizzato su tutti gli strumenti odontoiatrici e non. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica.

Modalità d'uso: Usare il prodotto diluito al 5-10% per 15' di contatto per un'attività battericida, al 10% per 15' per un'attività fungicida, al 10% per 60' per un'attività micobattericida, all'1% per 60' per un'attività virucida vs Adenovirus, al 15% per 60' per un'attività virucida vs HIV, HVC, HBV. Applicare con spugne, panni, irrigatori, pompe manuali o meccaniche o qualsiasi altro mezzo su pareti e superfici lavabili. Lasciare agire e risciacquare. La soluzione diluita è stabile per una settimana se viene utilizzata correttamente, senza contaminazione da sostanze e/o agenti esterni.

Composizione: 100,0 g di prodotto contengono: Benzalconio cloruro 10,0 g; O-fenilfenolo 1,0 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

Avvertenze: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P303-P361-P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305-P351-P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Contiene: Quaternary ammonium compounds. Agitare prima dell'uso. Il prodotto è incompatibile con detersivi e tensioattivi anionici. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura se correttamente conservato il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta. Non utilizzare confezioni danneggiate. Uso professionale.

Detergente Conforme al Regolamento (CE) 648/2004

Validità: 5 anni

Lotto e scadenza: vedi confezione

DISPOSITIVO MEDICO CE 0546 Direttiva Europea 93/42/ECC

Fabbricante:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Le avvertenze possono subire variazioni con gli aggiornamenti della scheda di sicurezza del prodotto