


SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

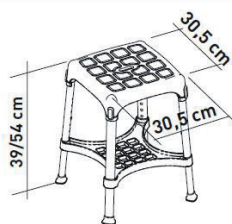

ITALIANO

DESTINAZIONE D'USO:

I prodotti della linea Sgabelli consentono all'utente di avere una maggiore autonomia e indipendenza nell'utilizzo della doccia durante l'igiene personale quoti-diana, riducendo l'affaticamento muscolare dovuto alla posizione eretta nonché i rischi di scivolamento e infortuni. Le versioni dotate di piedini in gomma antiscivolo assicurano maggior aderenza al pavimento, mentre i modelli con le gambe regolabili in altezza consentono agli utilizzatori di modificare facilmente l'altezza totale dello sgabello in base alle proprie esigenze. Le versioni dotate di disco girevole garantiscono maggiore libertà di movimento, senza doversi alzare dallo sgabello. Grazie anche alla loro flessibilità, gli sgabelli possono essere posizionati su pavimenti irregolari, tipici di molti piatti doccia. Gli sgabelli sono disponibili in tre diverse forme. Gli sgabelli possono essere facilmente spostati grazie al loro peso leggero. Gli sgabelli possono essere completati con un cuscino morbido che ne rende più confortevole l'utilizzo. I cuscini morbidi e i dischi girevoli sono venduti separatamente, come accessori.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI:

I prodotti della linea Sgabelli sono un valido aiuto per gli anziani, per gli utilizzatori di sedia a rotelle, per le persone con ridotta mobilità della zona lombare, delle ginocchia e delle anche, e per tutti coloro che hanno difficoltà a mantenere una posizione eretta durante le fasi dell'igiene personale quotidiana nella doccia. L'utente deve avere autonomia di equilibrio durante i movimenti necessari per passare alla posizione seduta e a eretta, nonché avere un'adeguata capacità di rimanere seduto. Si sconsiglia l'utilizzo degli sgabelli nel caso in cui l'utilizzatore abbia problemi di equilibrio o percezione.

PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 170Kg

AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA:

- Il peso massimo dell'utente, indicato su queste istruzioni di montaggio, non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, l'utente deve verificare che lo sgabello sia assemblato correttamente e in posizione stabile.
- Lo sgabello può essere utilizzato solo su superfici libere da ostacoli.
- Durante il montaggio del prodotto, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Manuale d'uso.
- Può aumentare il rischio di lesioni alle dita durante le fasi di montaggio.
- Non dondolarsi durante l'uso dello sgabello; può essere causa di scivolamento, ribaltamento o cedimento delle gambe.
- Tenere sempre lo sgabello su 4 gambe.
- Non modificare in alcun modo lo sgabello e tutti i suoi componenti.
- Non utilizzare lo sgabello se danneggiato o alterato in qualsiasi maniera.
- Dopo l'utilizzo, lo sgabello deve essere rimosso dal piatto doccia per evitare eventuali ostruzioni.
- Non utilizzare lo sgabello per scopi diversi da quelli previsti.
- Lo sgabello non deve essere riposto all'aperto.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte o cute lesa per prevenire possibili infezioni.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle procedure di pulizia e sanificazione. A fine di garantire un utilizzo sicuro e adeguato a rispettare gli standard di igiene, è necessario che l'utente esegua queste procedure prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale sia del dispositivo che di tutti i suoi componenti e controllare il fissaggio delle viti. Per la pulizia e sanificazione, è necessario attenersi alle seguenti procedure:

1. Indossare i guanti
 2. Prima di procedere ad un'accurata sanificazione, rimuovere lo sporco evidente.
 3. Utilizzare acqua o detersivi non aggressivi per la procedura di pulizia.
 4. Pulire con un panno asciutto e pulito.
- In alternativa, il prodotto può essere igienizzato in una lavastoviglie domestica alla massima temperatura. Il cuscino morbido deve essere lavato rigorosamente a mano

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:

Il prodotto è idoneo per essere riutilizzato da altri utenti. Prima di essere utilizzato da altri utenti, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, il prodotto deve essere controllato da rivenditori qualificati.

CORRETTA PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non smaltire il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:


Se si verifica un incidente grave che legato all'uso del presente dispositivo, contattare il produttore all'indirizzo info@imglobaldesign.com e l'autorità re-sponsabile nel proprio paese.

REF	Codice prodotto	LOT	Numero di lotto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
SN	Numero di serie		Data di fabbricazione
MD	Dispositivo medico		Leggere le istruzioni per l'uso

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.


1

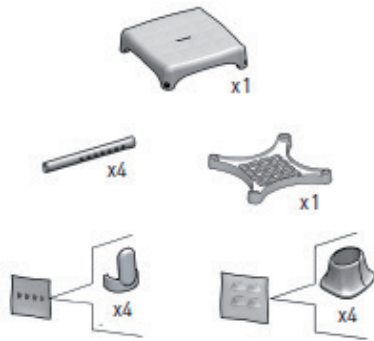

2




3

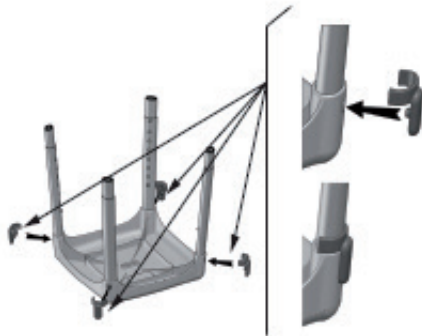


4



5

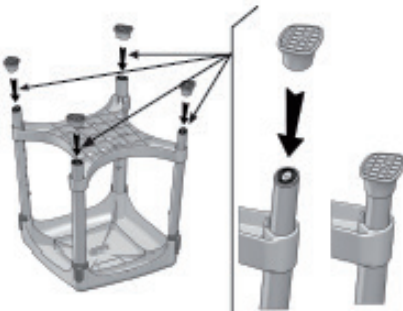

6

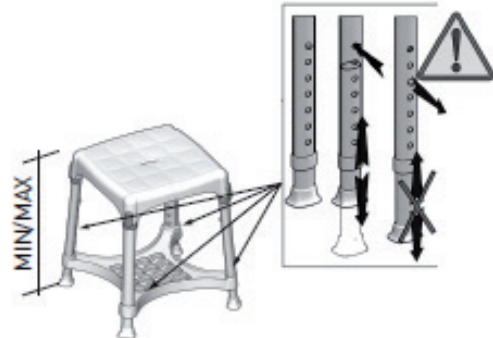

7



MAX USER WEIGH:
PESSO MASSIMO UTILIZZATORE:
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR:
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT:
PESSO MÁXIMO DEL USUARIO:
PESSO MÁXIMO DO UTILIZADOR
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:

170 Kg
375 lb



LM GLOBAL DESING Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

