



GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

BASTONE DA PASSEGGIO PIEGHEVOLE CON LED E VENTOSA

Manuale utente

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF

GB-801 (SV) (GIMA 43044)
GB-801 (BK) (GIMA 43045)

Fabbricato da: **Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd.**
No.1, Dali, Shenzen Town, Ninghai County Ningbo
315614, China
Made in China

Importato da **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gentile Cliente,
la ringraziamo per la preferenza accordataci. Prima di utilizzare il bastone è necessario consultare questo manuale ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni in esso indicate sia per l'utilizzo che per la manutenzione. Consultare un medico prima dell'utilizzo.
Il produttore/distributore non può essere ritenuto responsabile di danni causati da un utilizzo non corretto del prodotto.
Questo bastone comprende componenti delicati e deve essere trattato con attenzione.

AVVERTENZE

Non adatto a persone con peso superiore ai 110 kg.
Non utilizzare in caso di ghiaccio o condizioni scivolose.
Non adatto per persone con allergie al lattice.



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini, o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali a meno che non siano controllati da una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- 1 Asta del bastone
- 2 Manico del bastone
- 3 Luci LED
- 4 Pulsante di blocco
- 5 Tasto ON/OFF luci LED
- 6 Vano batterie
- 7 Cordino di fissaggio al polso



Come assemblare il bastone

Tenere la parte alta dell'asta del bastone (Fig. 1) in mano e lasciare semplicemente che i segmenti si snodino verso il basso.

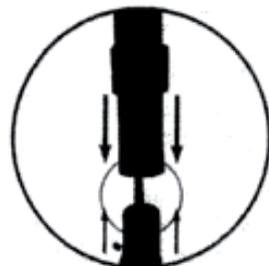


Fig. 1

⚠ Attenzione: per ridurre eventuali rischi e prevenire cadute, assicurarsi sempre che i segmenti dell'asta del bastone siano inseriti saldamente in posizione ed il pulsante di blocco sia correttamente emerso.

Controllare sempre lo stato delle ventose, alla presenza di una eccessiva usura della parte di appoggio o alla presenza di screpolature sospette che non assicurano più una perfetta tenuta al suolo, sospendere l'utilizzo del bastone immediatamente.

Come regolare l'altezza del bastone

- Svitare la ghiera (Fig. 2) in senso antiorario fino a quando non si sblocca.
- Premere il pulsante di sblocco e regolare l'altezza desiderata tra le 5 possibili posizioni indicate dai relativi fori (Fig. 3).
- Il pulsante di blocco dovrà fuoriuscire da uno dei fori di regolazione altezza.
- Riavvitare con cura la ghiera assicurandosi che il pulsante di blocco sia correttamente emerso.



Fig. 2

Come ripiegare il bastone

Il bastone può essere comodamente ripiegato in 4 segmenti per riporto o trasportarlo in comodità.

- Tenere il bastone in orizzontale o verticale e tirare per separare i segmenti dell'asta del bastone (Fig. 4).
- Ripiegare insieme i segmenti separati (Fig. 5) e riporre così il bastone.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Come accendere le luci LED

Premere il pulsante ON/OFF sulla testa del manico (Fig. 6) per accendere e spegnere le luci LED.

 **Attenzioni: le luci a LED si spengono automaticamente dopo 20 minuti.**

Installazione delle batterie

- Svitare coperchio del vano batteria (Fig. 7) sotto il manico utilizzando un cacciavite a croce.
- Sfilare il coperchio del vano (6) batteria seguendo la direzione della freccia impressa sullo stesso. Inserire quindi 3 batterie x 1.5V di tipo AAA seguendo la polarità indicata nel vano.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie e riavvitare.

 **Attenzione: non utilizzare batterie normali e ricaricabili insieme.**

 **Attenzione: rimuovere la batteria se il bastone non viene usato per un periodo prolungato.**

Cura del bastone

Pulire il bastone con un panno asciutto.

- Non immergere il bastone in acqua.
- Non utilizzare saponi o detergenti abrasivi, né oleosi. Non usare lubrificanti o prodotti simili.

 **Attenzione: controllare regolarmente il bastone per eventuali segni di usura, compreso qualsiasi deterioramento alla corda elastica interna ai segmenti. Se si notano segni di usura, interromperne immediatamente l'uso.**

Proteggere il bastone da:

- Temperature estreme.
- Urti e cadute - contaminazione e polvere.
- Conservare il bastone in un luogo fresco e asciutto.



Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Fig. 6

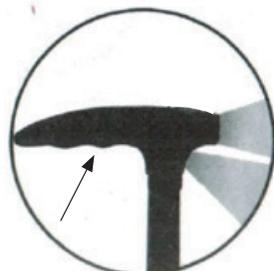


Fig. 7