

BASTONE CON SEDILE

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Bastone con sedile prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La punta è ricoperta da una gomma antiscivolo.

NORME DI SICUREZZA

Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per imparare ad usarlo in modo adeguato.

Non conservare all'esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari.

Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.

Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio) né sulle scale.

Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.

Osservare sempre i limiti di peso indicati sull'etichetta o nelle istruzioni.

Usare solo puntali originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso di lungo inutilizzo, far controllare l'apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.

Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l'usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

UTILIZZO

Per sedersi, far scorrere il sedile dall'alto verso il basso

MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto.

L'impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi).

Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Conservare al riparo dalla luce solare		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		

REF FS911L (43060)



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

