



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

BASTONE DA PASSEGGIO IN LEGA LEGGERA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Questo bastone non è un tetrapode! Esso deve essere utilizzato come un qualunque bastone da passeggio e non deve essere confuso con un ausilio atto ad aumentare la stabilità del paziente. La funzione dei 4 piedi è una comodità che serve esclusivamente per permettere al bastone di reggersi in piedi da solo quando non è utilizzato.

Non usare mai un dispositivo danneggiato

ISTRUZIONI PER L'USO

Procedura di regolazione dell'altezza. (Fig.1)

1. Disinserire la molla di bloccaggio. (Vedere Fig. 2)
2. Regolare l'altezza sfilando i tubi telescopici.
3. Riposizionare la molla di bloccaggio.

ATTENZIONE

Non usare attrezzi per rimuovere la molla di bloccaggio potrebbe danneggiarsi. La molla è dura da rimuovere per ragioni di sicurezza. (Fig. 2)


PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia: pulire regolarmente l'impugnatura con sapone neutro; non usare alcool o solventi.

Puntale: Il puntale di appoggio a terra (Fig. 3) è soggetto ad usura; si raccomanda di sostituirlo periodicamente usando **ricambi originali OPO**.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

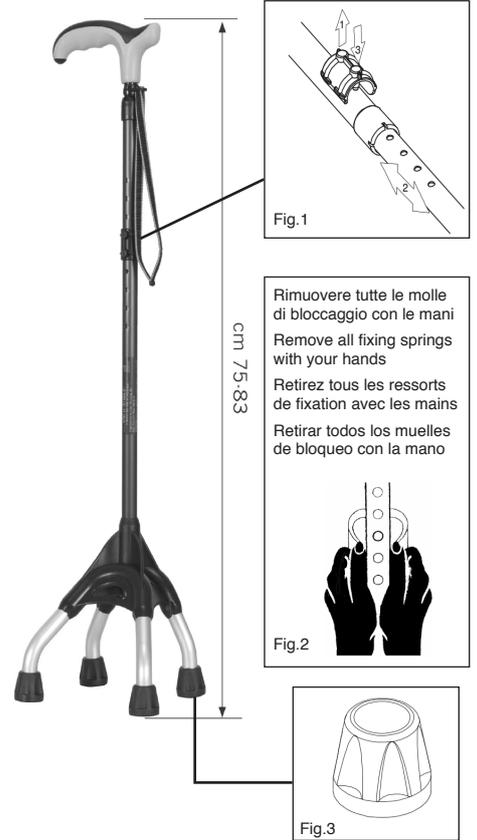

Peso Max. utente
Max. user weight
Poids maximal de l'utilisateur
Peso Máx. usuario
100 kg

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario

REF 0767/B (43075)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)
Made in Italy

