



Indicateur d'usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger



Evolution  
200 \*\*\*



Advance  
20 \*9\*\*



Progress I  
201 7\*\*



Progress II  
200 7\*\*



Tiki Turquoise-Purple: 200 510  
Tiki Orange-blue: 200 520



Désignation Designation Bezeichnung	Hauteur poignée Height handle/floor Griffhöhe	Angle poignée Support angle Winkel der Armauflagefläche	Réglage poignée Adjustable Handle Verstellung des Griffs	Largeur Cuff width Breite der Armschalen	Longueur poignée Handle length Grifflänge	Poignée Handle Griff		
Advance	76 - 101 cm	28 °	-	11 cm	10 cm	☉ 3.5 cm	0.52 kg	140 kg
Evolution								130 kg
Progres I			22 - 29 cm	150 kg				
Progres II				150 kg				
Tiki	55 - 77 cm	20°	11 - 21 cm	7 cm		☉ 3.2 cm	0.33 kg	100 kg

**Leggere** attentamente il presente Manuale per l'utente prima di utilizzare il dispositivo. Seguire le indicazioni e conservare il Manuale per l'utente in un luogo sicuro. Se il dispositivo dovesse essere utilizzato da altre persone, assicurarsi che abbiano prima letto attentamente il Manuale per l'utente.

#### 1. Avvertenze di sicurezza

- ♥ Fare SEMPRE riferimento al rivenditore autorizzato per le regolazioni del dispositivo e per imparare a utilizzarlo in modo corretto.
- ♥ Non conservare il dispositivo all'esterno e non lasciarlo esposto ai raggi solari. (Attenzione: non lasciare il dispositivo all'interno di un veicolo esposto in pieno sole!)
- ♥ Non utilizzare in caso di temperature estreme (superiori a 38°C / 100°F oppure inferiori a 0°C / 32°F).
- ♥ Controllare attentamente tutti i componenti del dispositivo (viti, tubi, puntali, impugnature...)
- ♥ Verificare regolarmente che tutti i componenti siano fissati (clip, tubi, puntali, impugnature..)
- ♥ Afferrare saldamente l'impugnatura quando si utilizza il dispositivo.
- ♥ In caso si verifichi una caduta, lasciare la presa del dispositivo allontanandolo dal corpo, in modo da non caderci sopra.
- ♥ Spostarsi in avanti sempre lentamente e con passi brevi per assicurare una buona distribuzione del proprio peso e per evitare perdite di equilibrio.
- ♥ Non utilizzare il dispositivo su superfici bagnate o ghiacciate (in caso di neve, ghiaccio, pioggia...!)
- ♥ Non utilizzare il dispositivo su scale; pericolo di infortuni!
- ♥ Utilizzare il dispositivo unicamente come ausilio per la mobilità e in modo corretto.
- ♥ Rispettare SEMPRE il limite massimo di peso riportato sull'etichetta del dispositivo.
- ♥ Il dispositivo non deve essere modificato in alcun modo. Utilizzare unicamente ricambi originali per la sostituzione delle parti danneggiate o rovinate. La sostituzione deve essere eseguita dal personale tecnico.
- ♥ Dopo il montaggio, accertarsi che il dispositivo sia bloccato in posizione OPEN (aperto) e che si trovi in posizione stabile sul terreno, prima dell'utilizzo.
- ♥ Verificare SEMPRE che il dispositivo e i suoi componenti siano bloccati e serrati in modo corretto e sicuro, prima dell'utilizzo.
- ♥ NON appendere alcun oggetto al dispositivo.
- ♥ In caso il dispositivo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, è necessario che il personale tecnico esegua un controllo prima

dell'utilizzo.

- ♥ Durante l'utilizzo prestare la massima attenzione a buche o deformazioni del terreno.
- ♥ La ventosa non deve essere eccessivamente usurata. Se la ventosa dovesse mostrare segni di usura eccessiva, chiedere al fornitore o al personale sanitario di sostituirla.

#### 2. Montaggio

Le regolazioni del dispositivo devono essere eseguite unicamente dal personale tecnico, che inoltre ve ne spiegherà il corretto utilizzo. Un utilizzo o una regolazione non corretta del dispositivo potrebbero comportare una sollecitazione eccessiva per il paziente o per il dispositivo stesso.

La regolazione del dispositivo deve essere eseguita dal personale tecnico e deve essere personalizzata per il paziente.

Fare riferimento al personale tecnico per il corretto utilizzo del dispositivo e assicurarsi di avere compreso perfettamente le istruzioni. In caso di dubbio, non esitare a chiedere ulteriori spiegazioni.

Regolazione dell'altezza: togliere la clip dai tubi aiutandosi con entrambi i pollici. Fare scorrere il tubo interno fino al foro di regolazione all'altezza desiderata, quindi bloccare nuovamente con la clip. La clip deve passare da entrambi i lati dei tubi. La stampella è dotata di 2 fori di regolazione posizionati sul tubo esterno e di 5 fori posizionati sul tubo interno, in modo da ottenere 10 posizioni di regolazione diverse. L'intervallo di regolazione della stampella è pari a 2 cm.

Mantenere la stampella vicina al corpo durante la deambulazione, per evitare cadute.

#### 3. Pulizia

La pulizia del dispositivo deve essere eseguita regolarmente con un detergente delicato e un panno morbido. Non utilizzare MAI sostanze OLEOSE! Pericolo di scivolamento! Richiedere al fornitore o al personale tecnico di controllare regolarmente il dispositivo. I puntali in gomma devono essere controllati e sostituiti regolarmente.

#### 4. Materiali

Tubo in alluminio anodizzato e impugnatura in polipropilene e inserto per impugnatura, in poliuretano morbido per il modello Advance.

#### 5. Smaltimento

L'utente è invitato a contattare l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

#### 6. Specifiche tecniche

La garanzia di questo prodotto copre qualsiasi difetto di fabbricazione e ha una validità di 24 mesi dalla data della fornitura.

Questo prodotto è biocompatibile. Conforme a standard DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 10993-1