



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE STILISH
STLISH ROLLATOR
DÉAMBULATEUR ÉLÉGANT
ANDADOR STLISH

ATTENZIONE: È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

ATTENTION: All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

AVIS: Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

ATENCIÓN: Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF 43164



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Accertarsi che queste istruzioni siano lette e implementate perfettamente. La mancata osservanza può arrecare lesioni all'utente. Conservare in un luogo sicuro per futura consultazione.

Uso previsto

Il deambulatore leggero a 4 ruote è progettato per fornire supporto e assistenza a coloro i quali non sono in grado, o non dispongono della sicurezza necessaria, di camminare senza un certo grado di sostegno. Questo deambulatore è concepito per uso interno ed esterno e si ripiega per essere facile da riporre e trasportare

Precauzioni di sicurezza - Cose da fare e quelle da non fare

- Non superare il limite massimo di peso dell'utilizzatore di 136 kg.
- Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.
- Non tentare di spingere il deambulatore mentre qualcuno occupa il sedile.
- Non utilizzare il sedile per trasportare persone o oggetti.
- Non utilizzare il sedile senza lo schienale in posizione.
- Non sedersi sul sedile quando il deambulatore è in pendenza.
- Utilizzare il deambulatore solo come supporto per la deambulazione.
- Utilizzare solo gli accessori e i pezzi di ricambio specificati per questo deambulatore
- I pesi dovrebbero essere trasportati solo con la borsa. Non appendere oggetti pesanti alle maniglie poiché ciò potrebbe influire sulla stabilità del deambulatore.

Precauzioni di sicurezza - Controlli prima dell'uso

- Assicurarsi che il deambulatore sia bloccato prima dell'uso.
- Controllare i freni prima dell'uso.
- Assicurarsi che tutte le parti siano sicure e che le parti mobili siano in buono stato di funzionamento.

Precauzioni di sicurezza - Durante l'uso

- Non azionare autonomamente il deambulatore quando si è seduti. Lesioni gravi per l'utilizzatore e/o danni al telaio o alle ruote del deambulatore possono risultare da un utilizzo improprio.
- Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro.
- È necessario prestare attenzione quando si superano cordoli e altri ostacoli o quando si transita su superfici in pendenza, irregolari o scivolose. Altrimenti potrebbero derivarne gravi rischi di caduta o lesione.
- Non eseguire alcuna regolazione del deambulatore mentre è in uso.
- Esercitare cautela quando c'è un carico pesante nella borsa (portata massima 5 kg)
- Tutte le ruote devono essere sempre in contatto con il pavimento.
- I freni devono essere in posizione di blocco prima di utilizzare il sedile.
- Quando si utilizza il deambulatore in posizione di arresto, i freni devono essere bloccati.

Elenco del contenuto

- A) 1 Telaio del deambulatore
- B) 2 Ruote anteriori estraibili
- C) 1 Borsa

Disimballaggio

- Controllare attentamente tutte le parti prima di assemblare il prodotto.
- Non montare se alcune parti sono danneggiate.
- Non montare se mancano alcune parti nell'elenco del contenuto.


Montaggio

A. Aprire il telaio abbassando le gambe posteriori fino al loro alloggiamento e fissarle. Controllare il corretto posizionamento.

B. Aprire il deambulatore, spingere verso il basso su entrambi i lati del sedile come mostrato nella figura.

IMPORTANTE: Entrambi i lati devono "fare clic" sulla posizione.

C. Inserire le ruote nella fessura della ruota anteriore. Assicurarsi di sentire un clic che indica che la ruota è posizionata correttamente.

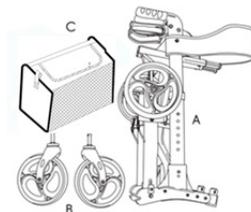

D. Procedere alla regolazione in altezza delle maniglie. Premere il perno di bloccaggio e regolare la posizione del manubrio all'altezza desiderata. Posizionare la borsa.

Ripiegamento del deambulatore (E)

Assicurarsi di stare dietro al deambulatore. Tirare la cinghia verso l'alto per piegare il deambulatore.

Trasporto del deambulatore (F)

Quando il deambulatore è ripiegato, lo si può trasportare usando le maniglie di sollevamento

Piegatura delle ruote posteriori (G)

Scorrere verso il basso la linguetta rossa per sbloccare la ruota posteriore. Piegare verso l'alto fino a bloccarla in posizione.

Rimozione delle ruote anteriori (H)

Per staccare le ruote anteriori, basta premere il pulsante rosso e tirare giù le ruote

Seduta

Quando si utilizza il deambulatore come seduta, accertarsi che vengano rispettate le precauzioni di sicurezza dettagliate nella prima pagina, in particolare;

- Accertarsi che i freni di stazionamento siano in posizione di blocco.
- Non utilizzare come seduta senza che lo schienale sia in posizione
- Non utilizzare come seduta su terreni in pendenza o irregolari
- Non superare il peso massimo dell'utilizzatore
- Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle

Controllo e funzionamento dei freni (I)

Prima di utilizzare il deambulatore, controllare sempre che i freni funzionino correttamente.

Per rallentare o frenare, tirare la leva del freno. Rilasciare la leva per riprendere la marcia

Per inserire il freno di stazionamento, spingere la leva del freno verso il basso nella posizione di blocco

Manutenzione e pulizia

Rimuovere sempre lo sporco che si forma dopo ogni utilizzo, utilizzando le soluzioni non aggressive e avendo cura di asciugare. Non usare spugne abrasive. Controllare periodicamente la funzionalità del freno e lo stato della tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.



A



B



C




D




E




F

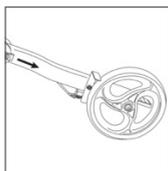

G

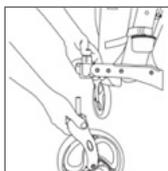

H

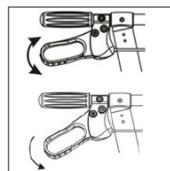

I

 REF	Codice prodotto		Fabbricante
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.