


È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

 Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l'utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

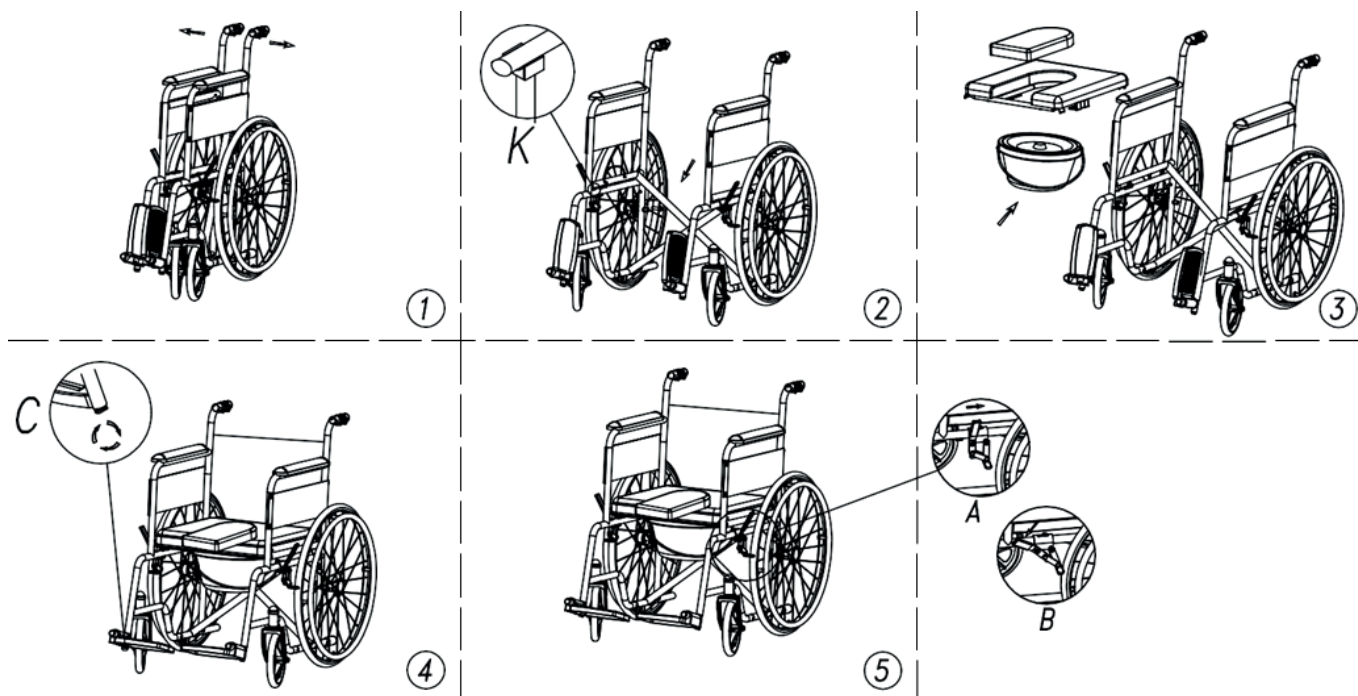

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Nota iniziale:** Stringere le mani su entrambi i lati del telaio per tirarlo, quindi abbassare la mano sul tubo della pressione (1,2); aprirlo completamente, come ad esempio (Figura 2) (il tubo scende sulla scheda di tipo C vista K).
- Istruzioni per l'installazione del sedile e della piastra di base:** come mostrato nella Figura 3, la prima piastra di montaggio, quindi installare il sedile e poi inserire il sedile, come (Figura 4) (si noti che per installare il prodotto completamente aperto, è necessario rimuovere il prodotto ricevuto).
- Descrizione dei freni:** Figura A stato di marcia, Figura B stato di frenata; tirare la leva del freno per rilasciare il freno la direzione della Figura A, Figura B, rispetto al freno (nota sull'uso del freno).
- Descrizione del piede:** La direzione nella Figura 3, come mostrato dalla rotazione del piede verso l'interno, può essere aperta utilizzando il movimento contrario; Caduta, Figura C allentare la vite di bloccaggio (regolare il piede regolabile in altezza, alto e basso).
- Caduta:** come prima cosa rimuovere il water e aprire il cuscino e la piastra del sedile, poi tenere il cordino del tubo per lo scarico.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

- Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
- Riporre in un locale ventilato.
- Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
- Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

PULIZIA

Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di candeggina.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura: 5 ÷ 38°C
Percentuale umidità: 20÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Temperatura: - 10°C ÷ 50°C
Percentuale umidità: 20÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	REF	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	LOT	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	MD	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	UDI	Identificativo Unico

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory
(LTD.) 5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

REF FS609U



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com

export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

