




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO PER BAMBINI CHILDREN BED LIT D'ENFANT CAMA INFANTIL

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI – INSTRUCTIONS ET MONTAGE
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE

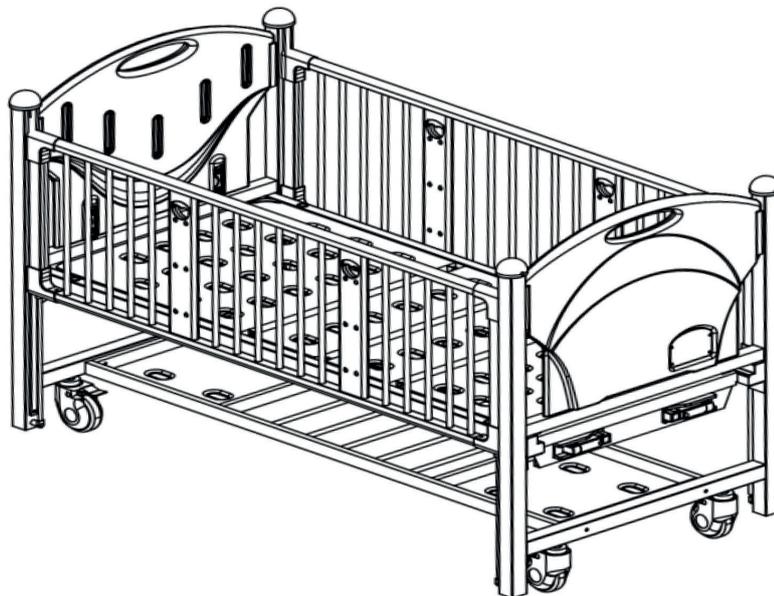

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Gima 43506 - 43507



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Made in China




CX2X



Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

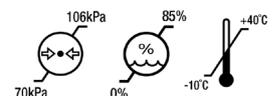

INTRODUZIONE AL MANUALE

Il lettino per bambini manuale è un letto appositamente progettato per i pazienti pediatrici ricoverati in ospedale o per altre persone che necessitano di una qualche forma di assistenza sanitaria.


Nota:
Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Si richiede a tutti gli utenti di conoscere il manuale d'uso e tutte le avvertenze.

- Il presente manuale è destinato al lettino per bambini CX2x. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo della manutenzione.
- La grafica di questo manuale serve solo come riferimento per l'utente. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.
- Il presente manuale utente contiene una descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- In caso di domande, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- Chiunque utilizzi o gestisca questo prodotto è tenuto a leggerlo e a rispettarlo.
- Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscerne le modalità d'uso e le precauzioni.

SPECIFICHE TECNICHE

- Modello: CX2X
- Peso del prodotto: 90KG
- Materiale: struttura in acciaio verniciato a polvere con testiera e pedana in PP
- Destinatari: pazienti pediatrici
- Funzioni utilizzate di frequente: spostamento dello schienale e del poggia-ginocchia
- Vantaggi clinici: sensazione di comfort per i pazienti pediatrici, funzioni operative semplici e garanzia di qualità.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

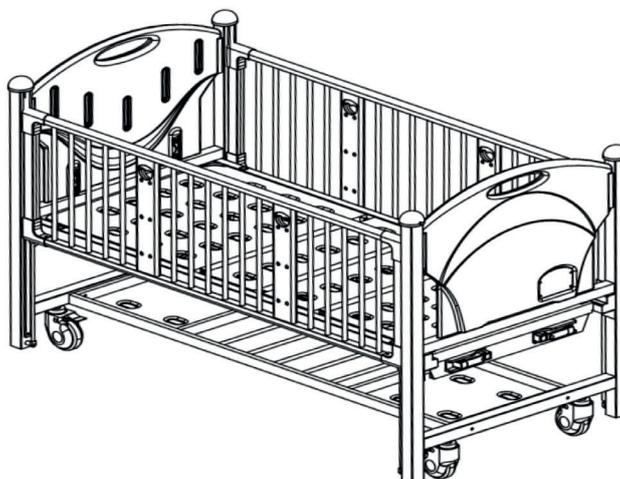

Lettino per bambini	Lunghezza	mm	1880±10mm
	Larghezza		900±10mm
	Altezza		1260±10mm
Range di inclinazione	Dietro	/	0-75±5mm
Range di inclinazione	Gamba	/	0-35±5°
Peso	Carico in sicurezza	Kg	170


Questo letto non è adatto per pazienti che pesano meno di 10 Kg. Il peso massimo raccomandato di un paziente è 145 Kg. Il carico di lavoro in sicurezza è calcolato come segue:

Peso massimo paziente: 145 Kg

Materasso: 5 Kg

Accessori (inclusi carichi): 20 Kg


TOTALE: 170 Kg

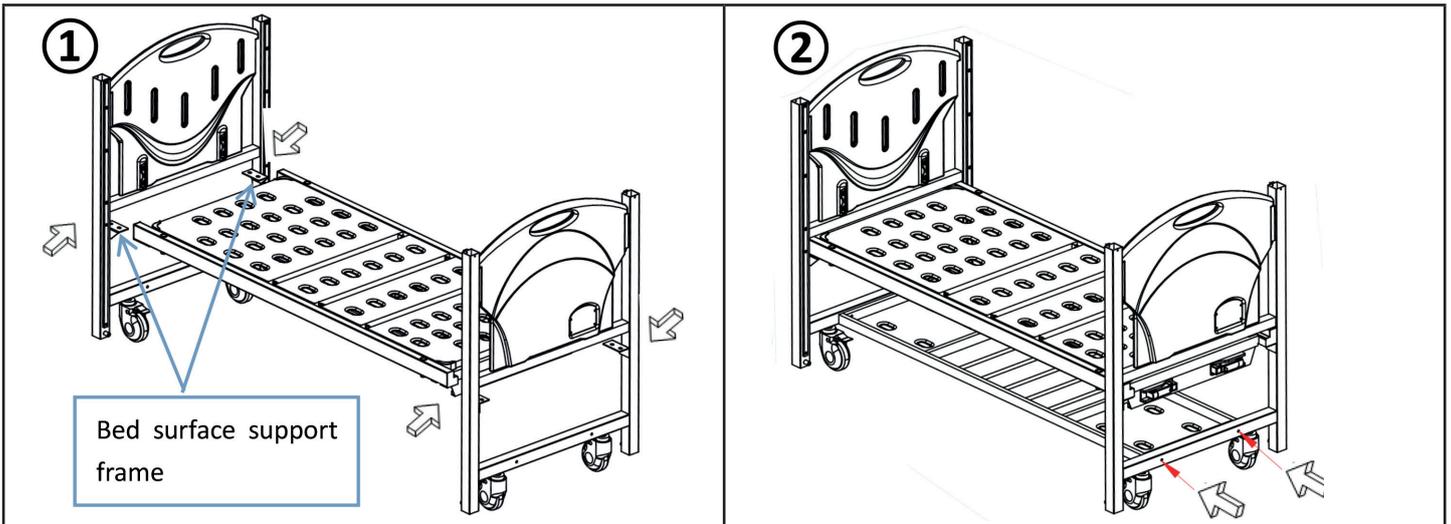

Installazione del telaio del letto: Collocare il pianale del letto sul telaio di supporto della testiera e della pedana e fissarlo con i bulloni esagonali esterni M8*20 (8 in totale)

Installazione del telaio: Il foro indicato dalla freccia è collegato in modo fisso con bulloni esagonali esterni M8*85 e dadi di bloccaggio M8 (4 in totale)


Nota: Dopo le operazioni di montaggio del punto 1 e del punto 2, verificare che $AB=CD$ e $CB=AD$, e che gli elementi critici superiori e inferiori siano quelli illustrati nella Figura 1.

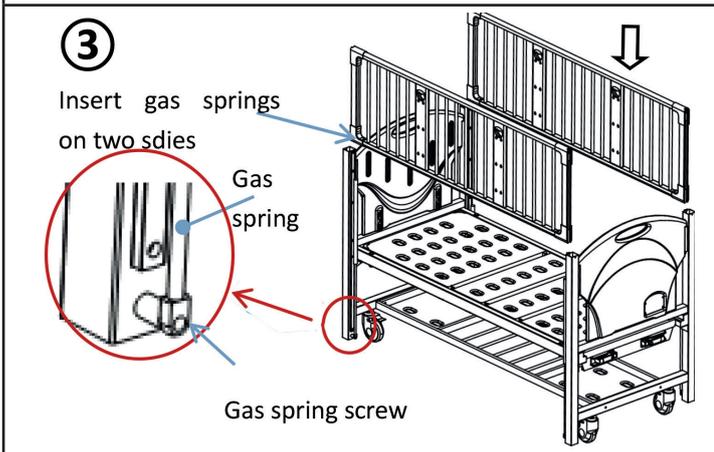

Installazione della molla a gas e del parapetto:

1. Fissare la molla a gas al telaio del letto come mostrato in figura e fissarla con 4 bulloni esagonali esterni M10*40
2. Inserire entrambe le estremità del parapetto nella molla a gas e fissarlo al telaio del letto dall'alto verso il basso.

Nota: Durante l'assemblaggio della fase 3, la vite della molla a gas non può essere bloccata e deve essere riservato uno spazio di 5 ± 1 MM in modo che la molla a gas possa regolare la posizione da sola, vedere la figura 2

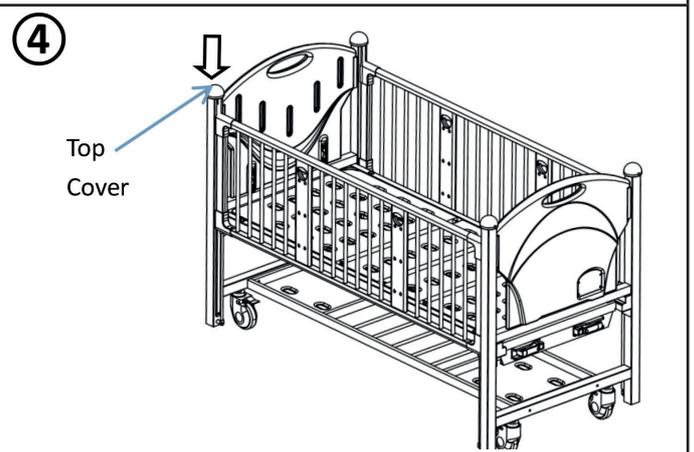

Installazione della copertura superiore:

1. Installare la copertura superiore sui quattro angoli


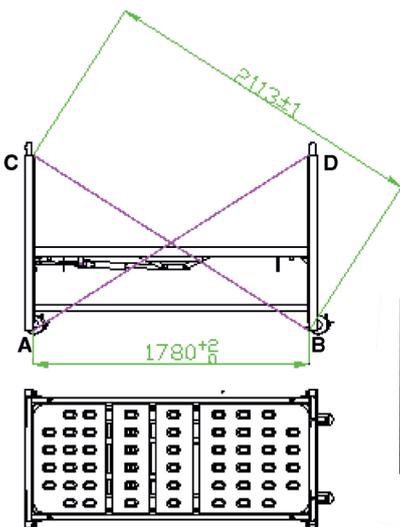


Figura 1

Figura 2

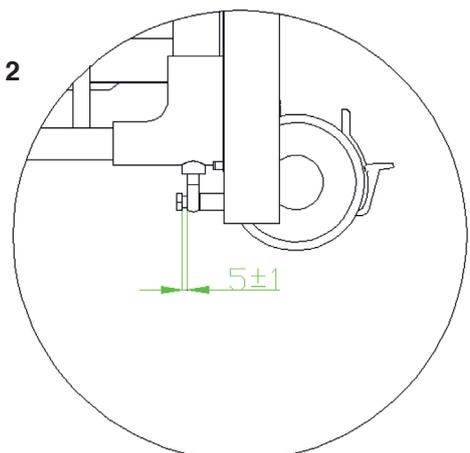

ESCLUSIONE DEI GUASTI

Guasti comuni	Motivi	Metodi di esclusione
Difficoltà a spostare l'intera culla	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

MANUTENZIONE DELLA CULLA IN ACCIAIO INOX

- Per utilizzare la culla in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di sicurezza sulla culla. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le funzioni siano normali.
- Quando il telaio della culla subisce un certo processo di invecchiamento e raggiunge un certo limite di tempo, la parte metallica della culla e le parti in plastica del telaio possono essere riciclate.
- Evitare di graffiare il pannello con strumenti o coltelli ad anelli. Evitare di graffiare il pannello con strumenti affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
- Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per la pulizia della culla, che causerebbero la formazione di ruggine sulla superficie in acciaio inox.
- Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.
- È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, per evitare di danneggiare il sistema frenante.
- L'usura della superficie del pneumatico della rotella può essere rilevata mediante ispezione visiva. È possibile che alcuni residui di filo, tessuti, fibre e altri accumuli si avvolgano intorno alla rotella, rimuovere i bulloni e i dadi della rotella, pulire i residui e controllare se il cuscinetto della rotella è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.
- A seconda del tempo di utilizzo, dell'usura e della sostituzione della rotella, è possibile sostituire le rotelle stesse e verificare che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarsi in questa operazione.
- Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di una culla dotata di più rotelle con freno, è possibile bloccare una rotella sola alla volta, il che consente di provare a spingere la culla e di verificare se le prestazioni del freno di ciascuna rotella sono buone. Se il funzionamento del freno viene meno a causa dell'usura o del deterioramento delle rotelle, sostituire immediatamente le rotelle e quindi testare nuovamente l'impianto frenante.
- Se il meccanismo dell'impianto frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra società. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, le prestazioni dei freni delle rotelle devono essere nuovamente testate.

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

- L'imballaggio della culla viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
- Durante il trasporto della culla, evitare di sottoporla a vibrazioni violente e di proteggerla dai raggi solari e dalla pioggia.
- La culla in acciaio inox deve essere conservata a:
 - Temperatura ambiente: -10°C ~ +40°C.
 - Umidità relativa: ≤ 85%.
 - Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa.

Spiegazione dei simboli:



Nota! Controllare la documentazione fornita con il lettino



Non usare il dispositivo a diretto contatto con la pelle





Immagine dei simboli	Simbolo descrizione
	Girare questa maniglia per controllare l'angolo della piastra posteriore



Girare questa maniglia per controllare l'angolo della piastra del ginocchio

ASSISTENZA POST-VENDITA

1. Conservare correttamente i documenti forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto, in modo da presentarli quando si richiede la garanzia e la manutenzione alla società.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare tempestivamente la nostra società, in modo che questa possa fornire un'assistenza tecnica accurata e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Non smontare da soli il dispositivo interno di questo prodotto per evitare danni inutili. Se l'uso è compromesso da problemi di qualità, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il nostro rivenditore autorizzato.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, la società fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto
5. Manutenzione a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

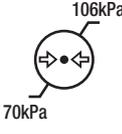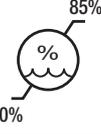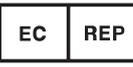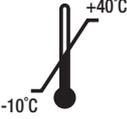	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Data di fabbricazione		Numero di lotto		Dispositivo medico
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	 106kPa 70kPa	Limite di pressione atmosferica	 85% 0%	Limite di umidità
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	 +40°C -10°C	Limite di temperatura		Importato da
			Identificativo unico		Numero di serie

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.