



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 3 SEZIONI**  
**3 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE**  
**TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 3 SECTIONS**  
**3-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH**  
**CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE TRES SECCIONES**  
**MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 3 SEÇÕES**

---

GIMA 44011, 44013

---

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller:

**Anji Sukar Furniture Co., Ltd.**

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

**REF** WT321A

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/importado por:

**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1

20060 - Gessate (MI) - Italy


gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Made in China



## ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica del tavolo. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura di legno.
2. Non sovraccaricare il tavolo oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche gravi per l'utente. Carico di lavoro massimo pari a 220 kg.
3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con un panno.
4. Prima di utilizzare il tavolo assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L'impiego del tavolo con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio del tavolo da parte di bambini, a meno che non siano sotto la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aguzzi, poiché potrebbero forare la copertura. Tenere il tavolo al riparo da oggetti taglienti o aguzzi.

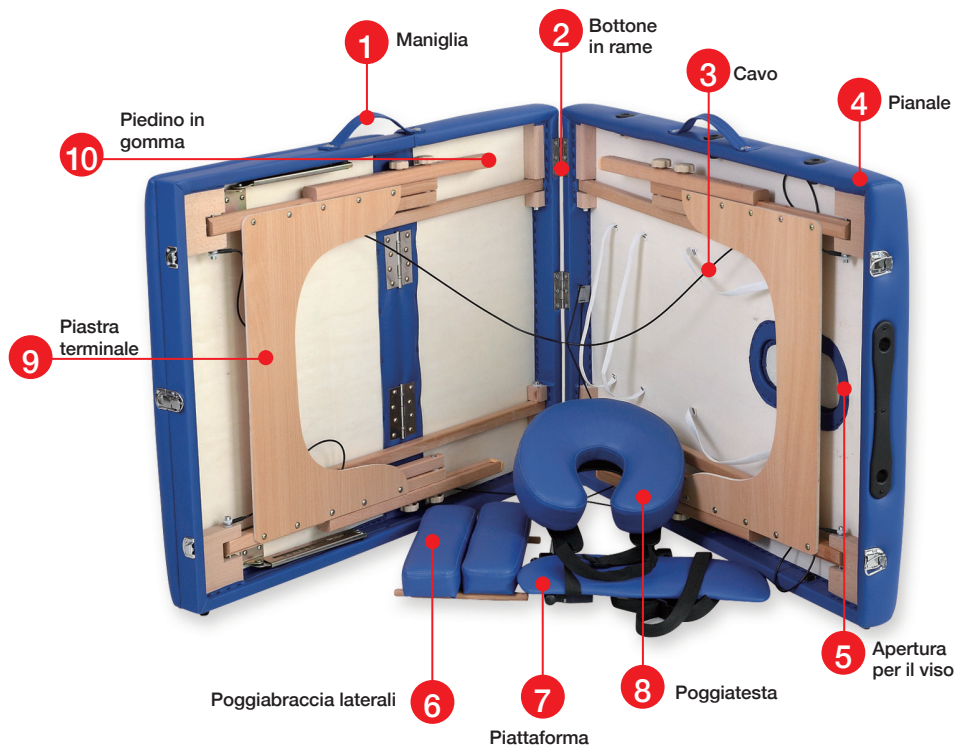

## MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:



1



2



3



4



5



6

1. Sbloccare la chiusura.
2. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma sul pavimento; aprire il tavolo allungando al massimo tutte e quattro le gambe. Estrarre tutti gli accessori.
3. Alzare il tavolo ponendolo nella sua normale posizione con tutte e quattro le gambe poggianti sul pavimento.
4. Collocare gli accessori nelle loro rispettive sedi; fissare il poggiatesta sospeso e inserire il supporto del poggiatesta.
5. Alzare uniformemente e lentamente lo schienale fino alla posizione richiesta.
6. A questo punto il tavolo è pronto all'uso.

L'altezza del tavolo può essere regolata girando i pomelli sulla gamba ed estraendo la gamba mobile per la regolazione dell'altezza (selezionando gli appositi fori sulla stessa gamba mobile). Quindi reinserire la gamba e serrare per bene i pomelli. Tutte e quattro le gambe vanno regolate nella medesima maniera, una alla volta, assicurandosi di impostarle tutte allo stesso livello di altezza.

## CHIUSURA E TRASPORTO DEL TAVOLO

1. Alzare lo schienale al massimo e poi spingere verso il basso; bloccare la chiusura.
2. Estrarre tutti gli accessori.
3. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma a terra.
4. Collocare tutti gli accessori sotto la cinghia elastica dietro il rivestimento superiore.
5. Piegare le gambe del tavolo su ciascuna estremità premendo i bracci di supporto corrispondenti.
6. Piegare il tavolo e bloccare la chiusura.
7. Il tavolo può essere trasportato per la maniglia come una valigia.



**Attenzione:** Se la struttura del telaio/gambe/tavolo presenta qualsiasi tipo di danni, non utilizzare il tavolo. L'impiego del tavolo danneggiato può causare pericoli o infortuni gravi per voi o per i vostri pazienti. Il tavolo va riparato immediatamente.



### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.