



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SEDIA PER MASSAGGI PIEGHEVOLE
FOLDABLE MASSAGE CHAIR
CHAISE DE MASSAGE PLIANTE
FALTBARER MASSAGESTUHL
SILLA DE MASAJE PLEGABLE
CADEIRA DE MASSAGEM DOBRÁVEL

GIMA 44050

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:

Anji Sukar Furniture Co., Ltd.

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang

Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

REF MC006

Importato da/imported by/importé par/importado por

GIMA S.p.A

Via Marconi, 1 – 20060

Gessate (MI) – Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China




ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica della sedia. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura metallica.
2. Non sovraccaricare la sedia oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche gravi per l'utente. Il prodotto è testato per sostenere un carico di lavoro massimo pari a 120 kg.
3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con un panno.
4. Prima di utilizzare la sedia assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L'impiego della sedia con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio della sedia da parte di bambini, a meno che non siano sotto la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aguzzi, poiché potrebbero forare la copertura. Tenere la sedia al riparo da oggetti taglienti o aguzzi.



MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:

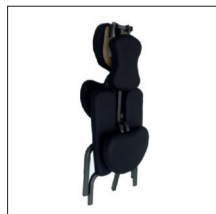

a



b



c




d




e




f

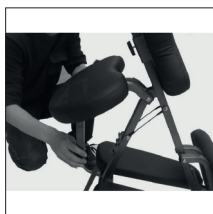


g

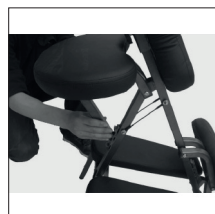


h

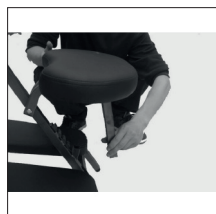

i

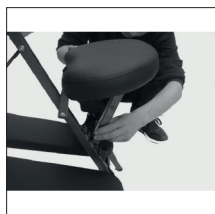

j

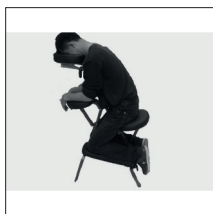

k

1. Estrarre la sedia per massaggi dalla scatola di cartone, come illustrato nella figura a.
2. Aprire le quattro gambe della sedia e verificare che le gambe poggino sul suolo allo stesso livello, come illustrato nelle figure b e c.
3. Regolare il supporto del poggiatesta nella direzione più comoda per l'utente, come illustrato nella figura d.
4. Regolare la posizione del poggiatorace e poi fissarla con l'ausilio del pomello nero dietro il poggiatorace stesso (vedi figure e e f).
5. Regolare il sedile mediante l'apposito supporto sedile, come illustrato nelle figure g e h.
6. Regolare il poggiaabbraccia mediante l'apposito supporto poggiaabbraccia, come illustrato nelle figure i e j.
7. A questo punto la sedia per massaggi portatile è pronta all'uso.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.