



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SGABELLO DA ESTETISTA
BEAUTICIAN STOOL
TABOURET D'ESTHÉTICIENNE
TABURETE PARA ESTÉTICA
BANCO DE ESTETICISTA
KOSMETIKHOCKER**

REF 1025A (GIMA 45260 - 45261 - 45262)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District, JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par /
Importado por / Importado por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



1 INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Questo manuale è inteso soltanto come riferimento per l'uso di questo particolare modello. Qualora il manuale venisse utilizzato per altri scopi, il fabbricante non si farà carico di alcuna conseguenza e non si assumerà alcuna responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono protette da copyright e non possono essere copiate e tradotte, nemmeno parzialmente, senza il consenso scritto del produttore.

2 AVVISO

- Non stare in piedi sul prodotto.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- Non posizionare il prodotto in luoghi umidi, ad es. in bagno. Non esporre alla diretta luce del sole.
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi sottoposti a verniciatura, anche a spruzzo.

3 PRECAUZIONI ALL'USO


- Gli operatori devono utilizzare questo prodotto in conformità alle istruzioni e conservare il manuale per consultazioni future.
- Attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza e non sovraccaricare. Accertarsi che i componenti del prodotto siano in buone condizioni; eliminare fattori che possano mettere a repentaglio la sicurezza.
- Serrare le rotelle, lo schienale e il sedile in modo adeguato, così da evitare malfunzionamenti causati da allentamenti o cadute di componenti.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato in caso di anomalie. Se si riscontrano fenomeni o suoni anomali, provvedere subito al controllo. Utilizzare dopo aver risolto il problema.
- L'operatore deve conoscere accuratamente le prescrizioni descritte in ogni capitolo del manuale sul prodotto per garantire la sicurezza personale e del prodotto.
- Posizionare il prodotto su suolo piatto.
- Se le rotelle sono danneggiate, sostituirle prima dell'uso.
- Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per rimuovere la polvere e le chiazze dalla pelle e dal legno.
- Collocare il prodotto in una posizione adeguata, in base alla disposizione generale, all'illuminazione diurna o artificiale e alle condizioni di funzionamento dell'ambiente di lavoro. Tenerlo in un ambiente pulito, asciutto e fresco.

4 ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO


1. Posizionare il prodotto in un luogo idoneo, in base al layout generale, alle condizioni di illuminazione naturale o artificiale e alle condizioni operative dell'ambiente di lavoro. Conservarlo in un ambiente pulito, asciutto e fresco.
2. Aprire il cartone di imballaggio per verificare se il lettino è intatto e se gli accessori o i pezzi di ricambio sono completi. Si prega di contattare il distributore o il produttore per qualsiasi tipo di problema.
3. Installazione

Questa immagine del prodotto è unicamente a scopo dimostrativo; per la struttura specifica, fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

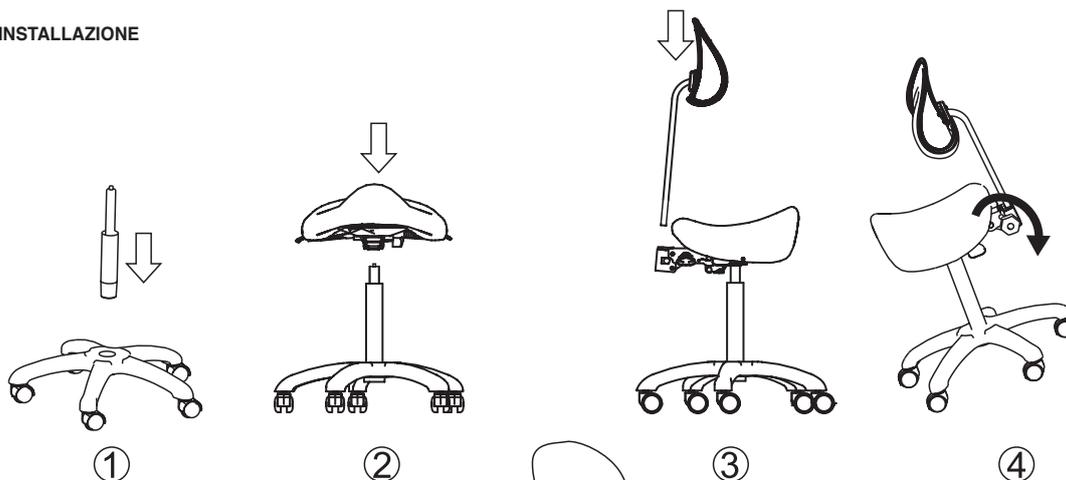


ISTRUZIONI DI UTILIZZO

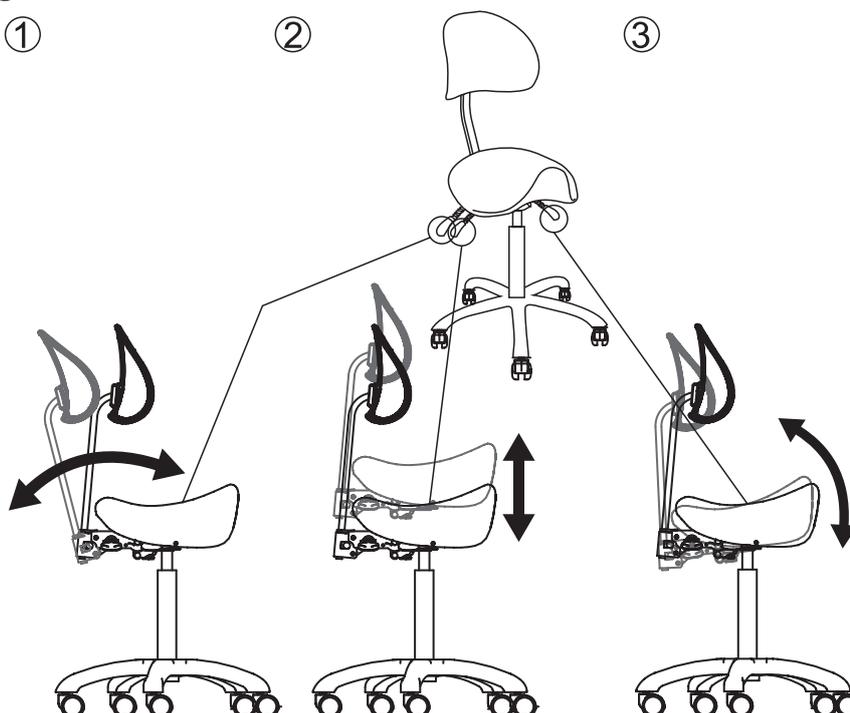

5 PARAMETRI TECNICI

Le illustrazioni del prodotto contenute in questo manuale si basano sui parametri di configurazione di un sistema di alzata a gas standard. Se è in dotazione un altro sistema opzionale di alzata a gas, i parametri dipendono dal prodotto effettivamente in possesso dell'utente.

Carico nominale di sollevamento	170kg
Dimensioni dell'imballaggio	590x300x600mm
Peso netto	9.3kg
Peso lordo	11.2kg

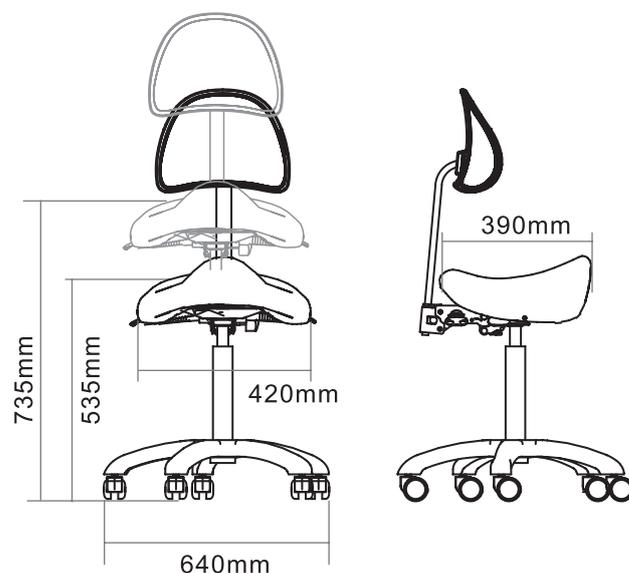

6 MANUTENZIONE

Se è presente il grasso, ripulire la superficie con acqua pulita e un reagente neutro, quindi utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere e le chiazze. È proibito utilizzare alcol, acidi forti, alcalinici forti o altri solventi per prevenire il prematuro deterioramento delle parti in plastica.

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

FUNZIONAMENTO NON CORRETTO	1. Impossibile alzare o abbassare lo sgabello.	1. Sostituire il sistema di alzata a gas.
	2. Le rotelle non riescono a muoversi o a girare.	2. Sostituire le rotelle.

Se il problema persiste anche dopo avere eseguito le operazioni sopra descritte, contattare il centro assistenza o il fornitore per risolverlo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.