



CAVI PAZIENTE ECG – ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE! Per prevenire rischi di folgorazione non collegare nessuna fonte di corrente.

I cavi paziente GIMA sono compatibili con gli strumenti indicati. È necessario rispettare la procedura di connessione raccomandata. Per disconnettere il cavo, tirare gentilmente il connettore, senza esercitare sforzi direttamente sul cavo. Prima di utilizzare un cavo verificare attentamente che il cavo stesso integro e compatibile con l'apparecchio in esame.

Pulizia: trattare i cavi paziente e le terminazioni GIMA con una soluzione di acqua tiepida e detergente non aggressivo. Pulire con un panno morbido. Non immergere i cavi paziente e le terminazioni GIMA mai ! Dopo la pulizia asciugare i cavi paziente e le terminazioni GIMA con un panno pulito. Per asciugare il cavo, tenerlo dal partitore derivazioni muovendo il panno verso il connettore, idem per le terminazioni. Evitare il contatto con detersivi aggressivi e con solventi aromatici, clorati, chetoni, etere o esteri. Soluzioni aggressive (quali soluzioni alcoliche o fortemente alcaline, solventi di media forza, soluzioni detergenti) danneggiano i cavi paziente e le terminazioni GIMA.

Disinfezione: i cavi paziente e le terminazioni GIMA possono essere trattati con disinfettanti contenenti etanolo (70%-80%), propanolo (70%-80%), aldeidi (2%-4%), dialdeidi attivate (Cidex) oppure ipoclorito di Sodio (Candeggina in soluzione acquosa 1:10). Non utilizzare solventi organici. Dopo il lavaggio, sciacquare i cavi con acqua e asciugarli con un panno pulito.

Sterilizzazione: i cavi paziente e le terminazioni GIMA possono essere sterilizzati con Ossido di Etilene (EtO). Dopo la sterilizzazione ventilare adeguatamente il cavo prima dell'uso. I cavi paziente e le terminazioni GIMA NON possono essere sterilizzati in autoclave.

Attenzione !

- disporre i cavi e le terminazioni in modo che il paziente o gli operatori non vi restino impigliati.
- non esporre il cavo o le terminazioni a radiazioni ultraviolette troppo intense. Non autoclavare !
- verificare l'integrità del cavo e delle terminazioni prima dell'uso.
- pulire e disinfettare il cavo e le terminazioni prima di applicarli ad un nuovo paziente.
- i prodotti GIMA possono essere usati o manipolati da solo personale qualificato.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.