

MASCHERINE MONOUSO ULTRA - ANESTESIA

- REF** CM-65810 (57711) MASCHERINA MONOUSO ULTRA – ANESTESIA N. 1 - neonato - rosa
- REF** CM-65820 (57712) MASCHERINA MONOUSO ULTRA – ANESTESIA N. 2 - bambino - giallo
- REF** CM-65830 (57713) MASCHERINA MONOUSO ULTRA – ANESTESIA N. 3 - adulto small - verde
- REF** CM-65840 (57714) MASCHERINA MONOUSO ULTRA – ANESTESIA N. 4 - adulto medium - rossa
- REF** CM-65850 (57715) MASCHERINA MONOUSO ULTRA – ANESTESIA N. 5 - adulto large - blu

Descrizione del prodotto:

La mascherina monouso ultra - anestesia è utilizzata collegata al rianimatore manuale per complementare la respirazione artificiale e la rianimazione cardiopolmonare.

Disponibile in cinque diverse dimensioni, da neonato ad adulto large. Tipo di cuscino iniettabile e non iniettabile.

Specifica materiale: PP e TPR.

Istruzioni d'uso:

1. Verificare che il flusso d'aria non sia ostruito prima dell'uso.
2. Collegare al circuito respiratorio con un raccordo adeguato.
3. Assicurarsi che tutte le connessioni siano compatibili e che siano collegate saldamente.
4. Fissare il dispositivo di ritenuta con la cinghia.

Avvertenze:

1. Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito e in un involucro sigillato.
2. L'utilizzo è inteso solo da parte di personale specializzato nelle tecniche di rianimazione cardio polmonare.

Attenzione:

1. La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un medico o su prescrizione medica.
 2. Il paziente deve essere monitorato costantemente quando il dispositivo è in uso.
 3. Conservare in luogo asciutto e pulito. Lontano da fonti di calore e dalla luce.
 4. Solo per l'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo può causare infezioni crociate. Non immergere, lavare, risciacquare o sterilizzare questo prodotto. Queste procedure possono lasciare residui nocivi sulla maschera.
- Distruggere il prodotto dopo l'uso.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	LOT	Numero di lotto		Fabbricante
	Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
REF	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Data di scadenza	CE	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE	EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

REF CM-65810 (57711) - CM-65820 (57712) - CM-65830 (57713)
CM-65840 (57714) - CM-65850 (57715)

 **CE** **0344**

 Besmed Health Business Corp. Taipei, Taiwan
Address: No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd.
Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan 24888
Made in Taiwan

Importato da:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

EC REP Mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71,
30855 Hannover-Langenhagen, Germany

