



Throat Scope®



Manufactured by: ThroatScope Pty Ltd. 1/48 Kalaroo Road, Redhead NSW 2290 Australia

www.throatscope.com

咽喉スコープ

ライト付き使い捨て舌圧子用ブレード

特徴

- 舌を押さえ同時に口内を照らすことが可能なライトと舌圧子が一体になった機能
- スリムで軽量化されたユニット
- 自動的に作動するライト
- 片手で行える操作
- 繰り返し使用可能なライト
- 使い捨てが可能なブレード
- 強力で長時間使える 3 x LEDライト

操作方法

ライト付き使い捨て舌圧子用ブレード（50個入り）の消耗品パックのお買い上げ有難うございます。使用前には必ず次の操作方法を良く読んでください。

注： ライト付き使い捨て舌圧子用ライトは別に販売されています。

注意事項及び警告

- 使い捨て用ブレードは1回に限り有効です。再利用はできません。ブレードを洗ったり、デッシュウォシャーに入れしないで下さい。
- 再使用するライトの交差汚染リスク軽減のため、アルコール成分70%を含んだイソプロピル使用の消毒用ウェットティッシュで拭き取って清掃する。
- 口内のみ使用可能な本製品です。舌を押さえ口腔内を照らすためのものです。
- 本製品は医療専門家によって使用されるものです。本製品の使用について自信がなかったり、不安がある場合は、医療専門家にご相談下さい。
- ライトを曲げたり、噛まないで下さい。
- ライトを分解しないで下さい。
- バッテリーが切れた場合ライトは捨てて下さい。
- 保護者のいない子供の手が届かない場所に保管して下さい。

使用方法

- 使い捨て舌圧用ブレードをライトに挿入する。挿入時にライトは自動的に作動する。
- 口腔に舌圧子用ブレードを入れて使用する。
- 使用後、ブレードはグリップを押して取り外し処理する。ライトは、ブレードが取り外されると自動的に消える。
- 使用後は、アルコール成分70%を含んだイソプロピル使用の消毒用ウェットティッシュで照明器の表面全体を完全に拭き取って清掃する。

